

【形状・構造及び原理】



種類：#タイプ I・#タイプ II・#吸引チップ

「原材料」：アルミニウム（ハンドル部）

：真鍮とステンレス（作業部）

【使用目的又は効果】

硬質レジン前装冠・陶材焼付冠・ボンティックなどの窓開けやくり抜きの形成器具。

【使用方法等】

火炎での使用か電気式に付けての使用かで選ぶ。
先端部に熱を加えワックスを溶かし網のなかえ吸い取る。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 二次加工の禁止：折損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、刻印等の二次加工は絶対に行わないこと。
- 2) ほこりや石膏くずが吸引されると目詰まりを起こし吸引力が低下するので、混入しないように注意。
- 3) 本機器は、ワックスを溶かし吸い取るが、本器機に熱を加えすぎると吸い取りが悪くなる。ワックスの融点（一般的に）50℃～60℃で、これより5℃～6度高い温度で毛細管現象を利用出来るので最も効率よくワックスを吸引出来る。

- 4) 薬液等が付着した場合、腐食するおそれがあるので速やかに清拭すること

【保管の条件】

- ① 使用後に吸引チップ内に取り込んだワックスをティッシュ等で熱を加えながらしっかり取り除いてから保管してください。
- ② 本品は使用によって熱を帯びていますのでやけど等には注意をする。

「使用期限等」

本品は、使用期限等を特別定めていない為長時間の使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため安全管理上新しい物と適時交換すること。

【保守・点検に係わる事項】

〈使用者による保守点検事項（日常点検）〉

使用前・使用後の点検：使用前・使用後にハンドル部、テ-パ部、作業部に破損、ヒビ、キズ等がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社イシズカ

電話番号：048-981-2850

〔製造業者〕

株式会社イシズカ

国名：日本

〔販売業者（販売店）〕

株式会社ピーディーアール

〒480-1132

愛知県長久手市上川原6番地7

電話番号：0120-108394

（フリーダイヤル）