

機械器具39 医療用鉗子

一般医療機器 歯科技工用鉗子(JMDN 70935000)

セラミック・クリップ

【形状・構造及び原理等】



部位	サイズ
全長	142mm
厚さ	1.9mm
先端作業部の径	1.8mm

「原材料」 : 保持部 : ステンレス
作業部 : 収縮チューブ・樹脂

【使用目的又は効果】

セラミック・クリップは、セラミック・ジルコニア等のノブの付いていないクラウンやテーパーの強いクラウン等の制作時に色々な角度から挟め、安全に作業が出来、焼成台への操作も簡単に出来、ジルコニアのステイニングにも適している。

【使用方法等】

セラミックス・ジルコニアクラウン等を2本の爪で挟みステイニングの作業を行う。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 二次加工の禁止: 折損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、刻印等の二次加工は絶対に行わないこと。
- 2) 本製品は全ての物を把持出来るわけではありません、角度の強い物・浅い物を使用した場合離脱する事も考えられますので十分に把持力を確認した上でご使用下さい。
- 3) 本機器は、セラミッククラウン等を内面から保持するもので、口腔内での使用は禁止です。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 「もらい錆」を防ぐため錆びている器具と一緒に保管しないこと、又、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
- ② 使用後に付着したワックスをティシュー等で取り除いてから保管してください。

「使用期限等」

本品は、使用期限等を特別定めていない為長時間の使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため安全管理上新しい物と適時交換すること。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項(日常点検)>

使用前・使用後の点検: 使用前・使用後にハンドル部、テーパー部、作業部に破損、ヒビ、キズ等がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社イシズカ
〒342-0044
埼玉県吉川市木売新田411-3
電話番号 : 048-981-2850

〔製造業者〕

株式会社イシズカ
国名 : 日本