

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 (JMDN 70935000)
ロータリー・クリッパー

【形状・構造及び原理等】



部位	サイズ
# クラウン用 全長	1 2 8 mm
# クラウン用 ハンドル部開径	3 7 mm
# インレー用 全長	1 2 6 mm
# インレー用 ハンドル部開径	4 0 mm

種類 : #クラウン用・#インレー用

「原材料」 : ステンレス

【使用目的又は効果】

補綴物研磨時に研磨物を挟み研磨物を指でおさえず
研磨が出来指が熱くならず、汚れにくい。

【使用方法等】。

補綴物研磨時に研磨物を挟む、補綴物を必要な方向へ
回転させながら研磨操作をし、レーズ研磨等にあてて
研磨をする。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 二次加工の禁止：折損等の原因となるので、
器具に対して曲げ、切削、刻印等の二次加工は
絶対に行わないこと。
- 2) 本製品は全ての物を把持出来るわけではありません、
角度の強い物・浅い物を使用した場合離脱する事も
考えられますので十分に把持力を確認した上で
ご使用下さい。
- 3) 本機器は、クラウン等を内面から保持するもので、
口腔内での使用は禁止です。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 「もらい錆」を防ぐため錆びている器具と一緒に
保管しないこと、又、化学薬品と一緒に収納・
保管しないこと。
- ② 使用後に付着したワックスをティッシュ等で取り
除いてから保管してください。

「使用期限等」

本品は、使用期限等を特別定めていない為長時間の使
用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事
が有るため安全管理上新しい物と適時交換すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項（日常点検）〉

使用前・使用後の点検：使用前・使用後にハンドル部、
テ-パ部、作業部に破損、ヒビ、キズ等がないかを確認す
ること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社イシズカ
〒342-0044
埼玉県吉川市木売新田411-3
電話番号 : 048-981-2850

〔製造業者〕

株式会社イシズカ
国名 : 日本