

吸引用延長チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

本品は、吸引器と回収容器との接続に用いるため、柔軟性のあるプラスチック製のチューブと、チューブ両端に接続のためのコネクタで構成され、チューブ各端のコネクタの種類により以下の型式がある。さらに各型式には、チューブ内径が5.0mmと6.5mmの2種による細分化がされている。本品には、チューブをシート等に固定するクリップが附属している。

本品は、E O G滅菌をしたものである。＊

型 式	各端のコネクタの種類	
メスーメスコネクタ	メス・ストレート	メス・ストレート
メスーオスコネクタ	メス・ストレート	オス・ストレート

1. 形状（図は、型式：メスーメスコネクタを示す）

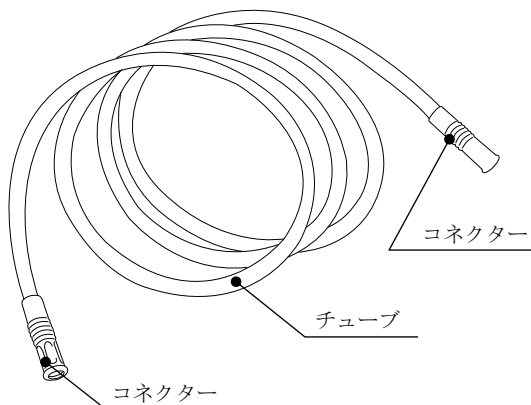

- 本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用しています。


【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

1. 本品の型式（コネクタ、チューブの長さ及び内径）が、本品を接続する吸引器、回収容器等の接続端末の形状や距離に適しているか確認する。
2. 包装に破損や劣化がないことを確認のうえ、包装より取り出す。＊＊
3. 本品の2つのコネクタを、接続先端末にしっかりと接続し、容易に脱落しないかを確認する。

4. チューブを安全に配管するため、本品の付属品のクリップをチューブに通して、クリップをシート等に固定する。

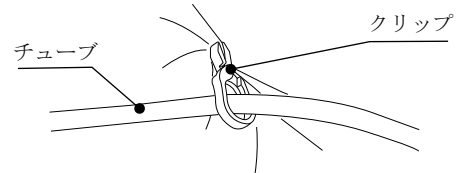

5. 使用前及び使用中は、チューブの折れ曲がりや他のものから押さえられることによるチューブの閉塞がないことを確認する。
6. 使用前及び使用中は、本品のコネクタが、抜けていないか又は抜けかかっているかを確認する。

【使用上の注意】

1. 製品及び包装に傷、異物、破損、劣化などを発見した場合は使用しないでください。＊＊
2. 刃物等鋭利なものに接触させないこと。[切断等により、液漏れや吸引できない恐れがある]
3. その他の注意
使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規則に従って、製品及び包装を廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法 ＊＊
温度：10～40℃、湿度：30～90%の場所で保管してください。
2. 使用期限
包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：eastsidemed 株式会社 ＊

東京都文京区本郷3-24-5

TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085