

IMGディスポイヤーシリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

本品は、シリコンで一体成型された中空の球体に円錐(先端が開いている噴出口)が付いたスポイト状の生体用洗浄器具である。

円錐先端部は柔軟な先細形状のため、鼻腔・耳腔などへの洗浄に適している。

本品は、E O G滅菌をしたものである。

1. 形状及び寸法 形状

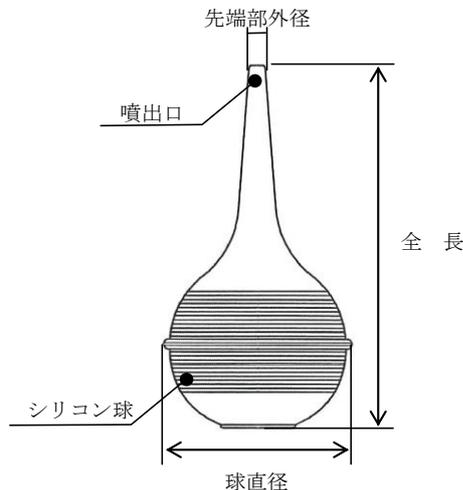

寸法

色	球直径	全長	先端部外径
ライトブルー	55.5mm	112.1mm	4.8mm

シリコン球の容量 : 60cc *

【使用上の注意】

1. 万一本品に傷・異物・劣化等を発見した場合は、使用しないこと。
2. 刃物等鋭利なものに接触させないこと。[切断の恐れ]
3. その他の注意
使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規則に従って、製品及び包装を廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】*

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
2. 有効期限
包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者: eastsidemed株式会社 **

東京都文京区本郷3-24-5

TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085

【使用目的又は効果】*

身体の一部に適用する液体を噴出する装置をいう。衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。手動式である。

【使用方法等】*

1. 本品のシリコン球部を手で押し潰しながら噴出口を洗浄液に入れ、押し潰しているシリコン球部の手を徐々に緩めることでシリコン球部の復元力により洗浄液を吸引する。
2. 洗浄液を吸引した後、本品の噴出口を洗浄部位に向け、再度シリコン球部を押し潰して洗浄液を噴出する。