

es バルブシリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


本品は、反発性のあるスポイトと細いノズルを有するシリンジで構成され、スポイトの圧縮を戻すことで液の吸入ができ、スポイトの圧縮でシリンジ先端から液を噴出できるものである。

本品は、E O G 滅菌をしたものである。

本品は、以下の種類がある。

種 類	スポイトの色	シリンジ容量
グリーン	グリーン	60cc

1. 形状

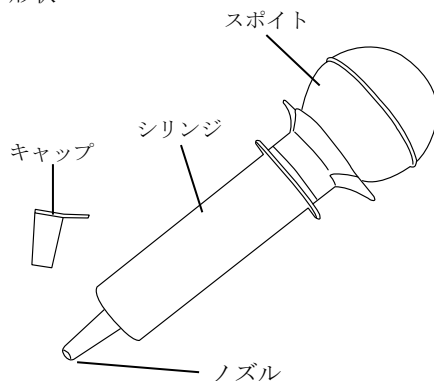

- 本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用しています。

【使用目的又は効果】

主に体腔の洗浄・フラッシングに使用されるもので、一方の端にゴム球が固定され、もう一方にノズルが付いている硬質プラスチック製の筒からなる器具である。

【使用方法等】

1. 包装に破損や劣化がないことを確認のうえ、包装より取り出す。＊
2. 本品をすぐ使用しないときは、附属のキャップをノズルにはめて、ノズルを保護する。
3. スポイトを押しつぶしながらシリンジ先端のノズル部分を液の中に入れ、スポイトのつぶし圧を開放して液を吸い上げる。
4. シリンジ先端のノズル部分を目的の部位に向け、スポイトを押しつぶして液を押し出す。

【使用上の注意】

1. 製品及び包装に傷、異物、破損、劣化などを発見した場合は使用しないでください。＊
2. 刃物等鋭利な器具に触れると切断する恐れがあるのでご注意ください。
3. 本品内に液が存在しているとき、キャップを液漏れのために使用しないこと。[キャップは、栓の機能をしない]
4. スポイト部をシリンジから引き抜かないこと。[内部の液が漏れる]
5. その他の注意
使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規則に従って、製品及び包装を廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法 ＊
温度：10～40℃、湿度：30～90%の場所で保管してください。
2. 有効期限
包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：eastsidemed 株式会社
東京都文京区本郷3-24-5
TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085