

I M G 胃洗浄用ゴムロートセット

再使用禁止

【警告】

1. 本品が破損状態にある場合は、絶対に使用しないこと。
2. 本品は、天然ゴムを使用している。
 - ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
 - ・天然ゴムと接触する機会の多い人は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。
3. 胃カテーテルを経口または経鼻より体内へ挿入する際は、慎重に行なうこと。[鼻腔、咽頭、喉頭、食道、胃粘膜への損傷や気管などへの誤挿入する恐れがある]
4. 胃洗浄自体が強い刺激となるため、自律神経反射が起こりやすく、徐脈、不整脈、低血圧を起こすことがある。

【禁忌・禁止】


- ・本品は再使用しないこと。
- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用をしないこと。
- ・胃の生検や手術を受けた直後で出血や穿孔の危険がある場合や胃切除後の患者には使用しないこと。
- ・明らかな出血性素因、食道静脈瘤、血小板減少症がある患者には使用しないこと。
- ・高圧蒸気滅菌は行なわないこと。[変形・破損]

【形状・構造及び原理等】

本品は、漏斗、及び連結するチューブから構成され、本品に接続した胃カテーテル（本品には含まず）を経口あるいは経鼻から胃に挿入し、漏斗に洗浄液を注入して胃の内容物を洗い出す洗浄器である。薬物中毒の救急処置や胃手術前の胃洗浄に使用する。

	推奨する胃カテーテル
大人用	No. 11（外径 11 mm）
小児用	No. 8（外径 8 mm）

1. 形状及び寸法 形 状

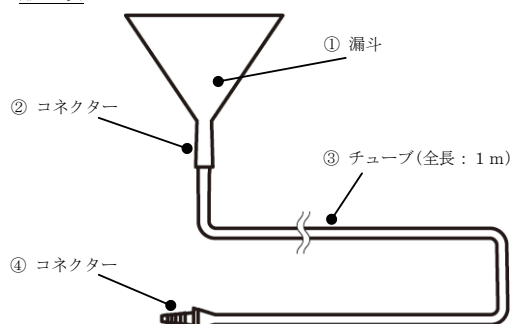

漏斗の容量：480mL

- 本品は、天然ゴムを使用しています。

【使用目的又は効果】＊

洗浄剤を注入する器具をいう。

【使用方法等】＊

1. コネクター（図④）に胃カテーテルを接続する。
（大人用として使用の場合は外径 11 mm、小児用として使用の場合は外径 8 mm を推奨します。）
2. 使用前に洗浄・消毒・滅菌等を行なって清潔にする。滅菌の場合は、EOG 滅菌（温度 60℃ 以下）を推奨します。
3. 本品のコネクターに胃カテーテルを挿入し、本品の各構成品がしっかり接続されているかを確認する。
4. 胃カテーテルを経口または経鼻に挿入する。
5. 挿入確認後、患者の体位を左側臥位にする。
6. 漏斗に洗浄液を入れる。成人は 1 回量 200～300 mL、乳幼児は体重当り 10～20 mL より開始する。
7. 漏斗の位置を胃より 30 cm 程高くし、落差により洗浄液を自然流入させる。
8. 漏斗の位置を胃より低くし、サイホンの原理によって胃内容物を排出する。
9. 十分に洗浄されるまで、前記洗浄操作を繰り返す。
10. 接続する胃カテーテルの添付文書も参照ください。

【使用上の注意】

1. 本品に傷・異物・劣化等が認められた場合は、使用を中止すること。
2. 洗浄液の注入、排泄
 - ・咽頭反射のない意識障害患者には、あらかじめ気管確保の処置をすること。
 - ・胃カテーテルを経口挿管する場合は、意識が回復したり、痙攣が起きたとき胃カテーテルを咬んでしまう可能性があるため、バイトブロックを使用して閉塞対策をしておくこと。
 - ・胃カテーテルは、体表にあて、あらかじめ挿入する長さにマーキングしておく。
 - ・急速の注入をしないこと。
 - ・漏斗は、落差を 40～50 cm 程度以上の高い位置にはしないこと。[高くすると洗浄液が急激に入り、嘔吐を誘発しやすい]
3. 本品は、再使用しないこと。[感染の恐れ、又は再滅菌によるゴムの劣化]
4. 接続する胃カテーテルの添付文書も参照ください。
5. その他の注意
使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規則に従って、製品及び包装を廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】＊

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者：eastsidemed 株式会社 ＊＊
東京都文京区本郷3-24-5
TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085