

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

シャープ ディスク

*【形状・構造及び原理等】

材質・形状

グラスファイバーにアルミナを塗布した円盤状研削材。

基準寸法

直径 25 mm×厚さ 0.3 mm

直径 35 mm×厚さ 0.5 mm

使用回転数

15,000rpm 以下

*【使用目的又は効果】

アルミナ等を用いる技工用研削材。

歯科用マンドレルに装着し、スプルー等の切断に用いる。

*【使用方法等】

歯科用マンドレルに取り付け、技工用エンジンで回転させ、歯科技工物に押し当てて使用する。

「使用方法等に関連する使用上の注意」

1. 歯科用マンドレルへの固定は確実にすること。
2. 歯科技工用回転機器メーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
3. 使用前にディスクに傷、破損等がないか確認し、低回転にて回転させて、振れがないことを確認し、振れがあった場合には、振れを取った後に使用すること。
4. 加工物はしっかりと保持し、無理に押し付けないこと。
5. 側面は使用しないこと。

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 使用回転数は、15,000rpm 以下で使用する。
2. 損傷、変形(曲がり、汚染)等のある物は使用しないこと。
3. 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないようにし、常温常湿で保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

井元特殊冶金株式会社 交野工場
TEL:072-891-0596

製造業者

インターデンタル アールアンドディー センター社 (大韓民国)
INTER-DENTAL R&D CENTER CO., LTD.