

**2018年10月（第6版）
*2017年 1月（第5版）

届出番号:13B3X00207000008

医4 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000
滅菌テラトラストX

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ガーゼ：綿100%

X線造影系：硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素 他

【使用目的又は効果】

*出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥若しくは汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる。X線で検知できる成分を含む。

【使用方法等】

手術用ガーゼとして適宜使用する。

【使用上の注意】

- 体内に留置しないこと。
- X線造影系だけをつかんで操作しないこと。
〔X線造影系が脱落するおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管すること。
- 滅菌保証期間：3年〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

**お客様相談窓口 03-3966-8254