

\*\*2018年10月 (第4版)  
\*2017年 1月 (第3版)

届出番号:13B3X00207000035

医4 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000  
テラトラストX-N

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

純綿糸及びX線造影糸からなるガーゼ。X線造影糸の両側を太い綿糸として脱落防止を図っている。

X線造影糸：硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素、他

**【使用目的又は効果】**

\*出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥若しくは汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる。X線で検知できる成分を含む。

**【使用方法等】**

手術用ガーゼとして適宜使用する。

**【使用上の注意】**

- 体内に留置しないこと。
- X線造影糸だけをつかんで操作しないこと。〔X線造影糸が脱落するおそれがある。〕

**【保管方法及び有効期間等】**

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称所等】**

製造販売業者：イワツキ株式会社

\*\*お客様相談窓口 03-3966-8254