

医4 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

イワツキ感染防護キット

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

不織布製ドレープ・キャップ・マスク・ガウン・シート・手袋・ピンセット・容器・固定用テープ・ゴーグル・ワイパーのうち、2品目以上を組み合わせで構成される。

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。利便性を高めるために、感染防護を目的として術者が着用するキャップ、マスク、ガウン等や器具を組み合わせている。

【使用方法等】

汚染に注意し、包装から製品を取り出す。
術者がキャップ、マスク、ガウン等を着用し、患者にドレープをかぶせ、必要な手技を行う。

【使用上の注意】

- 1 ドレープまたは固定用テープ（含まれる場合）の粘着材により、皮膚障害（発疹、発赤、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2 固定用テープをはがす時は、皮膚を傷めないように体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。
- 3 構成品に天然ゴム製のグローブが含まれる場合
 - 天然ゴムラテックスは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状をおこした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
 - 天然ゴムラテックスと接触する機会の多い方々は、天然ゴムラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。

- 4 構成品にプラスチック製のグローブが含まれる場合
体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがある。異常を感じたらご使用を中止すること。
- 5 構成品にピンセットが含まれる場合
ピンセットは部材の把持以外の目的で使用しないこと。
- 6 構成品に天然ゴム製又はプラスチック製のグローブが含まれる場合
手袋は、薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合があるので確認の上使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管すること。

〈有効期間〉

滅菌保証期間：3年〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

*お客様相談窓口 03-3966-8254