

医03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

ニトリルグローブCF

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ニトリルゴム製の未滅菌使い捨て検査検診用手袋

左右共通 パウダーフリー 指先エンボス

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

取り出し口より手袋を取り出し、着用する。

【使用上の注意】

- 体質によってはアレルギー反応などにより、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- 製品本体の特性上、刃物等鋭利なものに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
- 薬品、溶剤等によっては、膨張したり浸透したりする場合があるので、確認の上使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿をさけて保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないこと。

〈有効期間〉

有効期間：3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

お客様相談窓口 03-3966-8254