

医4 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材 34654000
(熱傷被覆・保護材 11322101)

メ ッ シ ュ シ ー ト

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

次の素材を積層し、シート状にしたもの。

表面材：ポリエチレン

吸収体：レーヨン不織布、高分子吸収材・パルプ

防水シート：ポリエチレンラミ ポリプロピレン不織布

本品はEOG滅菌済である

【使用目的又は効果】

術後創傷又は熱傷皮膚を被覆及び保護し、滲出液を吸収するために使用する。

【使用方法等】

表面材（メッシュシート）を創傷面にあてて使用する。

滲出液が多い場合には、ガーゼ等の他の吸収材の上に重ねても使用できる。

【使用上の注意】

1 重要な基本的注意

- 本品の使用中に皮膚障害若しくは創感染と思われる症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に応じて適切な交換及び処置を行うこと。

2 不具合・有害事象

一般的な創傷被覆保護材の使用における「不具合・有害事象」

- 創の感染症状
- 創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）
- 固着
- 壊死組織の増加
- 疼痛

3 その他の注意

- 防水シートは吸収しないので、創傷面にあてないこと。
- 本品を裁断して使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管すること。

〈有効期間〉

使用期限は包装に表示〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

お客様相談窓口 03-3966-8254