

類別：機械器具1 手術台及び治療台  
一般医療機器 一般的名称：手術台アクセサリ (70469000)

## フレキシブルラテラルポジショナー

### 【警告】\*\*

#### 【併用医療機器】

1. 本器を他社製品と組み合わせて使用する際は、製造販売元に取り付けの可否を確認すること（適正な組合せが得られないおそれがあるため）

### 【禁忌・禁止】


#### 【使用方法】

1. 修理・改造・分解をしないこと（破損等の原因となるため）\*\*
2. 本器に潤滑剤を塗布しないこと（変形・破損の原因となるため）\*\*

### 【形状・構造及び原理等】\*\*

1. 本器は、下表の各部品により構成される手術台アクセサリであり、概略は下図のとおりである
2. 各部品の中には、種類によりサイズが異なるものがある
3. 各胸受けの位置が調整できる

〈本器の基本構成〉

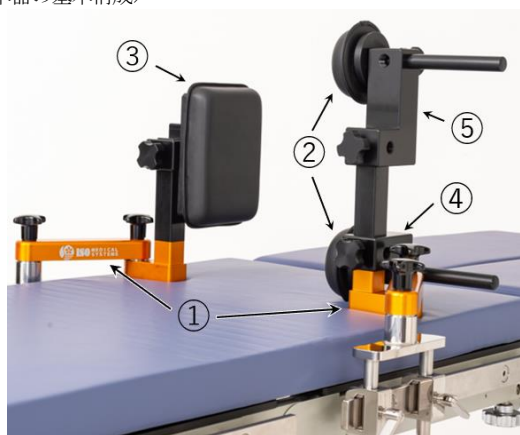

① 本体	④ L型コネクタ
② 丸型胸受け、マット	⑤ L型コネクタロング
③ 角型胸受け、マット	

〈組成〉 ステンレス、アルミニウム、樹脂、合皮

〈作動・動作原理〉 手動式である

### 【使用目的又は効果】

手術中、患者の体位を維持するために使用する

### 【使用方法等】

詳細については取扱説明書を参照すること

★印は使用上の注意を表す

1. 使用前及び使用中随時、各部品に異常がないかを確認する \*\*
  - ★ 異常が認められたときには使用を中止すること \*\*
2. 患者の体型及び術式に応じて、固定する部位に適する部品を選択する \*\*
3. 手術台のサイドレールのサイズを考慮して適切なレール取付コネクタを選択する
4. 患者を手術台にのせ、ポジショニングを行う

5. 本器を手術台のサイドレールに固定する
    - ★ レール取付コネクタが手術台のサイドレールに取り付けられる形状であっても、構造上問題がある場合は使用しないこと
  6. 胸受けの位置を調整し、各ボルトを締める
    - ★ 胸受けマット以外の本器各部に患者が接触しないよう注意すること
    - ★ 荷重が極度に集中しないよう注意すること
    - ★ 各胸受けは以下の位置に合わせてセットすること

〈前方1箇所固定の場合〉

前方・・・恥骨  
後方・・・恥骨とまっすぐ向き合う位置

〈前方2箇所固定の場合〉

前方・・・両腸骨  
後方・・・恥骨とまっすぐ向き合う位置、もしくは両腸骨を結んだ線上の一点
  - ★ 腸骨付近に胸受けを設置する際は、外側大腿皮神経等の神経に当たることがないように充分注意すること（胸受けで外側大腿皮神経等を長時間圧迫すると、神経障害が発生するおそれがある）
  - ★ 各ボルトの締め緩みがないよう確認すること
  - ★ 各ボルトを締める際は、ネジ穴に対してまっすぐに挿入してまわすこと
7. 手術中は随時体位の確認を行い、安定した体位を維持する \*\*
    - ★ 胸受けマットが胸受けに正しく重なっていることを常に確認すること
  8. 使用後は、速やかに消毒用アルコールまたは0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液を含んだ布で本器に付着した汚れ及び付着物を細部まで完全に除去し、水拭きを行った後、充分乾かしてから保管する \*\*

### 【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を参照すること

【使用注意（次の患者には慎重に適用）】\*\*

1. 感染症の患者に使用する際は、本器に血液・体液等が付着しないよう充分注意すること。万一付着した場合は、必要な措置をとること

### 【重要な基本的注意】\*\*

1. 調節時以外は、各ボルトを締めた状態に保つこと（破損・怪我等を引き起こすおそれがある）\*\*
2. 本器に無理な力や急激な荷重を加えないこと（破損等を引き起こすおそれがある）\*\*
3. 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力をかけたりしないこと \*\*
4. 本器に術者等の体重をかけたり押ししたりしないこと \*\*
5. 本器に粘性のテープ等を貼付しないこと（マットの表皮材の破れにつながり、かつ粘着剤が残りやすいため）\*\*
6. 皮膚障害、神経障害、血行障害等の発生には充分注意すること \*\*
7. 本器に薬品・有機溶剤・油・その他液体等を付着させないこと（変形・劣化・破損等の原因となる。ただし、清拭の際の消毒用アルコールおよび0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液を除く）\*
8. 使用前後には必ず、【保守・点検に係る事項】に示される保守・点検を行うこと

必ず取扱説明書をお読み下さい

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 本器は、標準的な使用条件で使用されていた場合、耐用期間は7年（自己認証による）である。また、マット類は2年を目安に交換すること
2. 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は、使用を中止し製造販売元へ連絡すること \*\*
3. 完全に乾燥させてから保管すること
4. 高温、多湿、水濡れ、直射日光、火気の近くを避けること
5. 温度や湿度の極端に変化する場所を避けること
6. 塵やほこりのない清潔な場所に保管すること
7. 変形や損傷の原因となりうる場所へは保管しないこと

**【保守・点検に係る事項】\*\***

詳細については取扱説明書を参照すること

1. 本器は日常点検し、正常に作動することを確認すること
2. 細部まで完全に汚れ及び付着物を取り除くこと
3. 本器に異常が発生したときには、製造販売元へ連絡すること \*\*

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

**製造販売業者及び製造業者**

**株式会社イソメディカルシステムズ**  
TEL 04 (7141) 4021