

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 (70683000)

パワークラウンリムーバー

*【形状・構造及び原理等】

*1.形状

4638-L



4638-R



*2.構成品

カタログ番号	カタログ名	全長 (mm)
4638-L	パワークラウンリムーバー L	150
4638-R	パワークラウンリムーバー R	150

3.組成

ステンレス鋼
窒化チタンコーティング

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内の補綴物の除去に用いる器具である。

【使用方法等】

- 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高压蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
- 補綴物の咬合面と側面の 2 箇所にて、本品の先端を引っ掛けることができるよう、2mm 径のドリルでそれぞれ孔を形成する。但し、補綴物の側面に十分なスペースがあり、孔を形成せずとも本品の先端を引っ掛けられる場合は、咬合面のみの形成でよい。
- 補綴物に本品の先端を引っ掛け、ハンドル部を握り補綴物を除去する。
- 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

前歯の補綴物を除去する場合は、本品の先端を舌側ではなく頬側に引っ掛けること。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起す恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は、開放し汚れを残留させないこと。
- 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。

- 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
- 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
- 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者: パワーデンタルユーエスエー社
(Power Dental USA, Inc.)