


機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子(70683000)

パワーサージカルキュレット

*【形状・構造及び原理等】

*1.形状

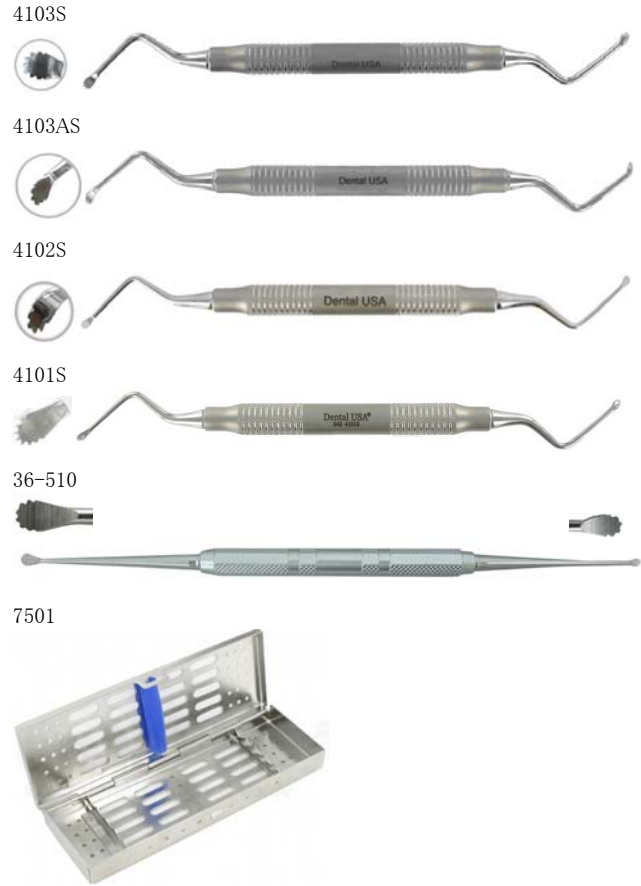

- 3.使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 4.塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 1.使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
- 2.汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用するこ
- 3.超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
- 4.洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
- 5.洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- 6.使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
- 7.強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 8.洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ:http://www.itx.co.jp
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:パワーデンタルユーエスエー社
(Power Dental USA, Inc.)

*2.構成品

カタログ番号	カタログ名	刃部最大径 (mm)
4103S	パワーサージカルキュレット 86S	3.5
4103AS	パワーサージカルキュレット 86AS	3.5
4102S	パワーサージカルキュレット 85S	2.7
4101S	パワーサージカルキュレット 84S	2.2
36-510	ITX サージカルキュレットストレート 84/85	2.0/3.0
7501※	カセット#3	－
4126	パワーサージカルキュレットキット	－

※雑品

3.組成
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離、除去を行うための器具であり、拔牙窩の搔爬等に用いる。

【使用方法等】

- 1.本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
- 2.本品を用いて拔牙窩の搔爬等を行う。
- 3.使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

【使用上の注意】

- 1.使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 2.折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。