


再使用禁止

アナログ

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】

**1 形状

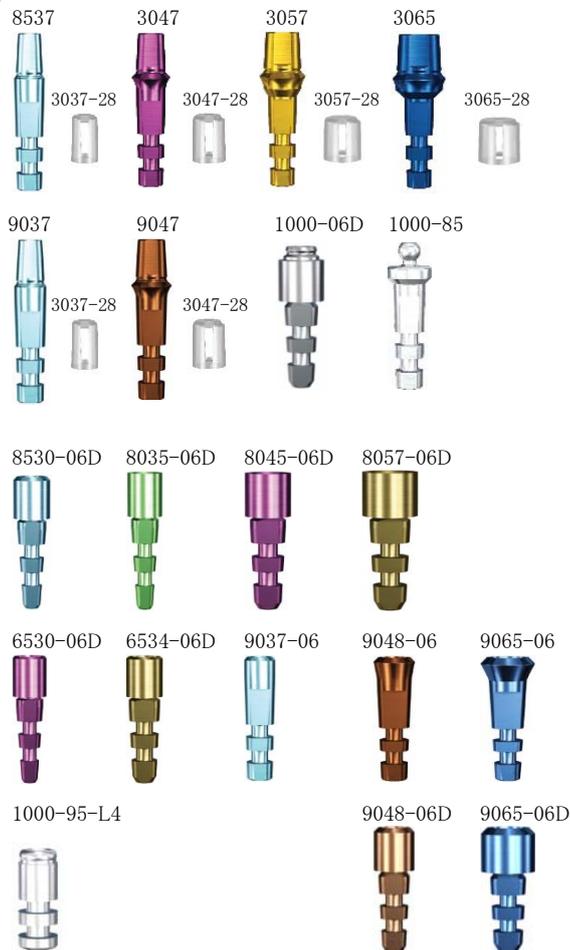

**2. 寸法

No.	カタログ番号	カタログ名	最大外径(mm)	同梱されるコーピング(※)
1	8537	LG ストレートアバットメントアナログ W3.7	3.7	3037-28
2	3047	ストレートアバットメントアナログ W4.7	4.7	3047-28
3	3057	ストレートアバットメントアナログ W5.7	5.7	3057-28
4	3065	ストレートアバットメントアナログ W6.5	6.5	3065-28
5	9037	SW ストレートアバットメントアナログ W3.7	5.7	3037-28
6	9047	SW ストレートアバットメントアナログ W4.7	6.5	3047-28

No.	カタログ番号	カタログ名	最大外径(mm)
7	1000-06D	スクリー固定式アバットメントアナログ チタン	5.0
8	1000-85	ボールアバットメントアナログ	5.0

No.	カタログ番号	カタログ名	プラットフォーム径(mm)
9	8530-06D	LG インプラントアナログチタン P3.0	3.0
10	8035-06D	LG インプラントアナログチタン P3.5	3.5
11	8045-06D	LG インプラントアナログチタン P4.5	4.5

12	8057-06D	LG インプラントアナログチタン P5.7	5.7
13	6530-06D	AC インプラントアナログチタン P3.0	2.9
14	6534-06D	AC インプラントアナログチタン P3.4	3.3
15	9037-06	SW インプラントアナログ P3.7	3.7
16	9048-06	SW インプラントアナログ P4.8	4.8
17	9065-06	SW インプラントアナログ P6.5	6.5

No.	カタログ番号	カタログ名	最大外径(mm)
18	1000-95-L4	ロケーター フィメールアナログ 4mmD (4 列)	4.1

No.	カタログ番号	カタログ名	プラットフォーム径(mm)
19	9048-06D	SW インプラントアナログチタン P4.8	4.8
20	9065-06D	SW インプラントアナログチタン P6.5	6.5

※同梱されるコーピング

No.	カタログ番号	カタログ名	最大外径(mm)
23	3037-28	ストレートアバットメントキャストابلコーピング* W3.7 用	3.7
24	3047-28	ストレートアバットメントキャストابلコーピング W4.7 用	4.7
25	3057-28	ストレートアバットメントキャストابلコーピング W5.7 用	5.7
26	3065-28	ストレートアバットメントキャストابلコーピング W6.5 用	6.5

3. 組成

アルミニウム
ポリアセタール
チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具であり、模型上でインプラント体のレプリカ等として使用する。

【使用方法等】

1. 本品を印象採得用トランスファーと連結し、石膏模型を作製する。
2. 模型内に埋没されたアナログ上で、上部構造を作製する。ストレートアバットメントを無形成で装着する場合には、補綴物の適合性を高めるために、鋳造工程でコーピングを用いることが可能である。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 本品の使用後は適切に廃棄し、再使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸入先国 : アメリカ合衆国
輸入先製造業者: インプラントダイレクト社
(Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC)