

再使用禁止

キャストブルコーピング

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.形状

3037-28



3047-28



3057-28



3065-28



2.寸法

一連番号	カタログ番号	カタログ名	最大外径(mm)
1	3037-28	ストレートアバットメントキャストブルコーピング W3.7 用	3.7
2	3047-28	ストレートアバットメントキャストブルコーピング W4.7 用	4.7
3	3057-28	ストレートアバットメントキャストブルコーピング W5.7 用	5.7
4	3065-28	ストレートアバットメントキャストブルコーピング W6.5 用	6.5

3.組成

ポリアセタール

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するための模型において、最終補綴物の適合性を高めることを目的として使用する。

【使用方法等】

本品は上部構造製作用の作業模型に装着し、技工操作上の鑄造工程を経て金属に置換わり最終的には補綴物となる。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 本品の使用後は適切に廃棄し、再使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インブラテックス

ホームページ:<http://www.itx.co.jp>

TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :アメリカ合衆国

輸入先製造業者:インプラントダイレクト社

(Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC)