

再使用禁止

スキャンアダプター

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1.形状

1000-09P



8730-09PT



8735-09PT



8745-09PT



8757-09PT



6530-09PT



6534-09PT



9048-09PT



9065-09PT



ットメントの位置情報をスキャンングで得るために用いるアダプター。

【使用方法等】

【使用方法】

本品は未滅菌であるので、清潔領域での作業となる場合は、使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高压蒸気滅菌を行うこと。

推奨滅菌条件:132℃ 15分間

- ①位置情報を取得したいインプラント(アナログ)やアバットメントに本品を付属のスクリューにて接続する。
- ②本品と対象物の接続状態が確実であることを確認する。
- ③本品及び周辺組織、構造物のスキャンングを行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1)付属のスクリューでの締め付けは、スキャンアダプター本体が変形しない程度の適切な強さで行うこと。
- (2)スキャンアダプター本体のスキャンング対象部の取扱は徒手的に扱い、金属製インスツルメント等の把持等によりキズをつけないようにすること。

【使用上の注意】

- 1.使用前にスキャンアダプター本体のスキャンング対象部にキズ、変形等がないことを確認すること。
- 2.使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ:http://www.itx.co.jp
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:インプラントダイレクト社
(Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC)

2.構成品

カタログ番号	カタログ名	外径(mm)	高さ(mm)
1000-09P	スキャンアダプタースクリュー固定 AB用	5.0	10.0

カタログ番号	カタログ名	プラットホーム径(mm)	外径(mm)	勘合部からの高さ(mm)
8730-09PT	スキャンアダプターレガシー P3.0	3.0	5.0	10.0
8735-09PT	スキャンアダプターレガシー P3.5	3.5		
8745-09PT	スキャンアダプターレガシー P4.5	4.5		
8757-09PT	スキャンアダプターレガシー P5.7	5.7	5.7	
6530-09PT	スキャンアダプターインタラクティブ P3.0	3.0	5.0	
6534-09PT	スキャンアダプターインタラクティブ P3.4	3.4		
9048-09PT	スキャンアダプタースイッチュ P4.8	4.8		
9065-09PT	スキャンアダプタースイッチュ P6.5	6.5	6.5	

3.組成

PEEK樹脂、チタン合金

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために、インプラント及びアバ