

機械器具 36 医療用ピンセット  
一般医療機器 ピンセット(35079001)

## ACE 治療用ピンセット

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### \*\*1.形状

20-001-07



20-253-67



96-000-26



#### \*\*2.寸法

カタログ番号	カタログ名	全長(cm)
20-001-07	コーン スーチャー プライヤー 15cm	15.0
20-253-67	ピックアップ ピンセット チタン 16cm ロック付	16.0
96-000-26	ボーン グラフト ホールディング ピンセット 20cm	20.0

### 3.組成

ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

綿花、綿球、歯肉などの組織片等を把持するために用いる。

### 【使用方法等】

- 1.本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件:121℃ 20分間  
134℃ 5分間
- 2.本品の把持部を手指により把持し、先端部にて組織等を把持する。
- 3.使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

### 【使用上の注意】

- 1.使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 2.折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 3.使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 4.塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起す恐れがあるので使用しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1.使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
- 2.汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- 3.超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 4.洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
- 5.洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- 6.使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検をすること。
- 7.強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 8.洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス  
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>  
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :アメリカ合衆国

輸入先製造業者:エースサージカルサプライ社  
(ACE Surgical Supply Co.,Inc.)