

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 (31776000)

ACE ミラー

【形状・構造及び原理等】

1.形状

003-2969



003-2970



003-2971



2.寸法

カタログ番号	カタログ名
003-2969	舌側用 フォート ミラー #1
003-2970	頬側用 フォート ミラー #2
003-2971	咬合面用 ミラー #3

*3.材質・組成

フロートガラス

【使用目的又は効果】

本品は、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなる歯科用器具で、口腔内の診査及び圧排のために用いられる。

**【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件:121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 本品を口腔内にて直視しにくい部位にあてがい、診査観察を行う。

**【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。

7. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ:http://www.itx.co.jp
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:エースサージカルサプライ社
(ACE Surgical Supply Co.,Inc.)