

機械器具 42 医療用剥離子
歯科用起子及び剥離子 (70683000)
歯科用キュレット(31904000) / 歯科用インプラント手術器具 (70965001) / 歯科用開創器 (13380000)

ACE 剥離子(サイナスリフトインスツルメントキット)

形状・構造及び原理等

1.形状
003-4194



2.寸法
サイナスリフトインスツルメントキット(003-4194)

カタログ番号	カタログ名	全長 (cm)	届出番号
10-002-36	サイナスリフトキュレット #1DE 19cm	19	13B1X00053 B00005
10-002-37	サイナスリフトキュレット #2DE 16.5cm	16.5	
03-110-77	デーラムアントラル エレ ベータ#3 16.5cm	16.5	
カタログ番号	カタログ名	先端径 (mm)	届出番号
71-40-243	デブスバックinggage DE チタン 16.5cm	3.3/4.0	13B1X00053 B00018

カタログ番号	カタログ名	全長 (cm)	届出番号
03-110-88	シェファードサイナスリ フトリトラクター18cm	18.0	13B1X00053 B00004
03-110-23	フレーアペリオエレベ ータ DE 19cm	19.0	13B1X00053 B00013
※765-1050	滅菌トレー	—	

※雑品
3.組成
ステンレス鋼 / チタン合金

使用目的又は効果
本品は口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具である。

使用方法
1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 本品を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等の除去を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

使用上の注意
1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

保守・点検に係る事項
1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用するこ
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等
製造販売業者 :株式会社 インブラテックス
ホームページ:http://www.itx.co.jp
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:エースサージカルサプライ社
(ACE Surgical Supply Co.,Inc.)