

ユニグラフト ナイフ

【形状・構造及び原理等】

1.形状


65-000-14



65-000-05, 65-000-08



取付図

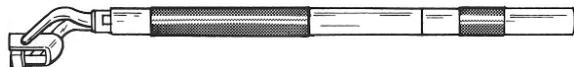

2.寸法

| カタログ番号 | カタログ名 | 長さ(cm) |
|-----------|------------|--------|
| 65-000-14 | ユニグラフトハンドル | 17.0 |

| カタログ番号 | カタログ名 | 厚さ x 幅(mm) |
|-----------|--------------------|------------|
| 65-000-05 | ユニグラフト替刃 1.5mm×6mm | 1.5 × 6 |
| 65-000-08 | ユニグラフト替刃 1.5mm×9mm | 1.5 × 9 |

3.組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、専用ハンドルに刃を装着し、歯肉等の軟組織を切断及び切離し、剥離させる方法で口蓋角化上皮、及び、結合組織、等を採取するために用いる器具である。

*【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20分間
134℃ 5分間
2. 本品に専用ハンドルを装着し、歯肉粘膜に押し付け、回転させて軟組織を切断・切離す。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起す恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は分解、開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。

7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ:http://www.itx.co.jp
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸入先国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:エースサージカルサプライ社
(ACE Surgical Supply Co.,Inc.)