


歯科材料 9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー (16670000)

## ACE 歯科用ダイヤモンドバー


### 【形状・構造及び原理等】

#### 1.形状

00-23-0080

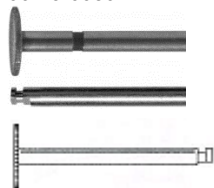

00-50-0080

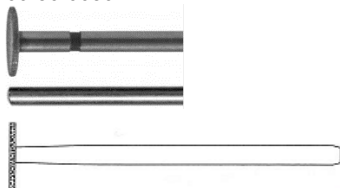

#### 2.寸法

| カタログ番号     | カタログ名                  | ヘッド外径<br>(mm) |
|------------|------------------------|---------------|
| 00-23-0080 | サーキュラーソー CA φ5.0/22mmL | 5.0           |
| 00-50-0080 | サーキュラーソー HP φ5.0/44mmL | 5.0           |

#### 3.組成

ステンレス鋼/頭部ダイヤモンドコート

### 【使用目的又は効果】

本品は、微細なダイヤモンド結晶で砥着されたスチール製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器具である。金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の研削に用いることもある。

### \*【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高压蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間  
134℃ 5 分間
2. 必要サイズのバーを選択し、研削を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレープ等にて滅菌して保管する。

#### 【使用方法等に関する使用上の注意】

- 1) 本品は使用前に芯ぶれなどに支障のないことを確認すること。使用に適さない場合には新品と交換すること。
- 2) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。
- 3) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

### 【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズ確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス  
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>  
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505  
輸入先国 : アメリカ合衆国  
輸入先製造業者: エースサージカルサプライ社  
(ACE Surgical Supply Co., Inc.)