

ACE グラフトシリンジ

*【形状・構造及び原理等】

輸入先製造業者: エースサージカルサプライ社
(ACE Surgical Supply Co., Inc.)

*1. 形状

98-000-35
98-000-45
98-000-60
SYBG



*2. 寸法

カタログ番号	カタログ名	先端径 (mm)
98-000-35	グラフトシリンジ カーブ φ 3.5mm	3.5
98-000-45	グラフトシリンジ カーブ φ 4.5mm	4.5
98-000-60	グラフトシリンジ カーブ φ 6mm	6.0
SYBG	グラフトシリンジ カーブ φ 7mm	7.0

*3. 組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は骨移植を行う際に、移植部位への填入に使用する。

**【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 移植材を本品に充填する。
3. 移植部位に移植材を先端から押し出し填入する。
4. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌し、保管する。

**【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものの選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎすること。仕上げすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505
輸 入 先 国 : アメリカ合衆国