

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用カーバイドバー (16668000)

再使用禁止

ACE 歯科用カーバイドバー

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】

1.形状

21-44-1960, 21-50-1960, 21-65-1960, 21-44-1980, 21-50-1980,
21-65-1980



61-44-1902, 61-50-1902



**2.寸法

カタログ番号	カタログ名	先端径(mm)
21-44-1960	ラウンドバー HP φ 1.8/44mm	1.8
21-50-1960	ラウンドバー HP φ 1.8/50mm	1.8
21-65-1960	ラウンドバー HP φ 1.8/65mm	1.8
21-44-1980	ラウンドバー HP φ 2.3/44mm	2.3
21-50-1980	ラウンドバー HP φ 2.3/50mm	2.3
21-65-1980	ラウンドバー HP φ 2.3/65mm	2.3
61-44-1902	テーパバーバー HP φ 1.6/44mm	1.6
61-50-1902	テーパバーバー HP φ 1.6/50mm	1.6

3.組成

ステンレス鋼

タングステンカーバイド

【使用目的又は効果】

タングステンカーバイド製の作業部で骨等の硬組織を研削するために用いる。

【使用方法等】

歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。
- 2) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【使用上の注意】

1. 本品は滅菌済み製品であり、包装の破損したものについては絶対に使用しないこと。
2. 本品の使用後は適切に廃棄し、再使用しないこと。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

滅菌製品の有効期間は 3 年間である。(自己認証による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インブラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:エースサージカルサプライ社
(ACE Surgical Supply Co.,Inc.)