

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用カーバイドバー (16668000)

ACE 歯科用カーバイドバーRU

**【形状・構造及び原理等】

**1.形状

31-31-0024




31-68-0031



31-50-0023



40-50-0016

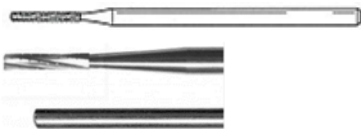

ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:エースサージカルサプライ社
(ACE Surgical Supply Co.,Inc.)

**2.寸法

カタログ番号	カタログ名	ヘッド径 (mm)	全長 (mm)
31-31-0024	オーバルボーンカッティングバー CA φ 5.5/10mm 31L	5.5	31
31-68-0031	オーバルボーンカッティングバー HP φ 4.0/9mm 68L	4.0	68
31-50-0023	オーバルボーンカッティングバー HP φ 5.5/10mm 50L	5.5	50
40-50-0016	シリンダーバー HP φ 1.5/7.5mm 50L	1.5	50

3.組成
ステンレス鋼
タングステンカーバイド

【使用目的又は効果】
タングステンカーバイド製の作業部で骨等の硬組織を研削するために用いる。

- 【使用方法等】
1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
 2. 歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削する。
 3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

- 【使用方法等に関連する使用上の注意】
- 1) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。
 - 2) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

- 【使用上の注意】
1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
 2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
 3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
 4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者 :株式会社 インブラテックス