

機械器具 39 医療用鉗子  
一般医療機器 鉗子(10861001)

## STM 止血鉗子

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

3800.12, 3800.14



3805.12, 3805.14



3810.12




3815.12, 3815.14



3826.14



3827.14

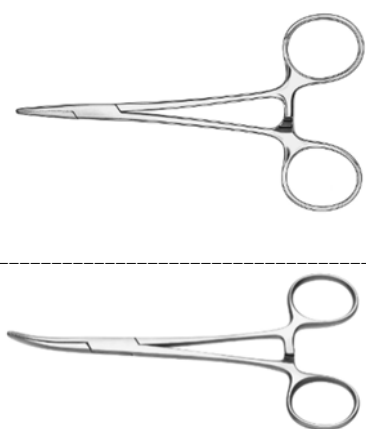

#### 2. 寸法

| カタログ番号  | カタログ名                 | 全長 (cm) |
|---------|-----------------------|---------|
| 3800.12 | ハルステッドモスキート 12cm      | 12      |
| 3800.14 | ハルステッドモスキート 14cm      | 14      |
| 3805.12 | ハルステッドモスキート 曲 12cm    | 12      |
| 3805.14 | ハルステッドモスキート 曲 14cm    | 14      |
| 3810.12 | ハルステッドモスキート 有鉤 12cm   | 12      |
| 3815.12 | ハルステッドモスキート 曲 有鉤 12cm | 12      |
| 3815.14 | ハルステッドモスキート 曲 有鉤 14cm | 14      |
| 3826.14 | ケリー 14cm              | 14      |
| 3827.14 | ケリー 曲 14cm            | 14      |

#### 3. 組成

ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

本品は、臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる。本品は再使用可能である。

### 【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高压蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間  
134℃ 5 分間
2. 本品先端部で血管等の組織を把持部の開閉により把持固定し、止血等を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

### 【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがある

ので使用しないこと。

8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス  
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>  
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸入先国 : ドイツ

輸入先製造業者: ストーマ社  
(Storz am Mark GmbH)