

機械器具 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 持針器 (12726010)

STM 持針器

***【形状・構造及び原理等】

***1.形状

4742.17, 4738.17, 4743.17, 4739.17




4719.12, 4719.14, 4719.16




14748.15, 14748.18, 14747.15, 14749.15, 14749.18, 14758.15,
14758.18, 14759.15



4710.15, 4710.18

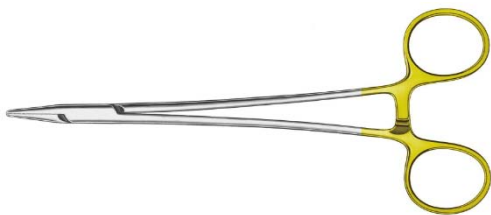

4704.18

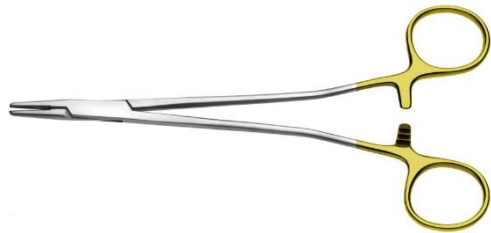

14760.18



4707.12



4760.15




14744.18




14745.15, 14745.18, 14745.28, 14746.01, 14746.15, 14746.18,
14750.18, 14751.15, 14751.18



4714.00, 4712.00

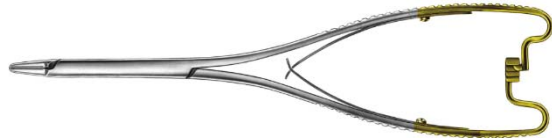

4708.14, 4708.18

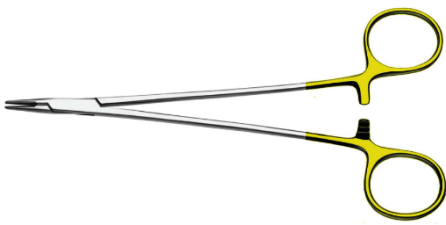


4723.14, 4723.17



4701.14, 4701.17



4709.16, 4709.18

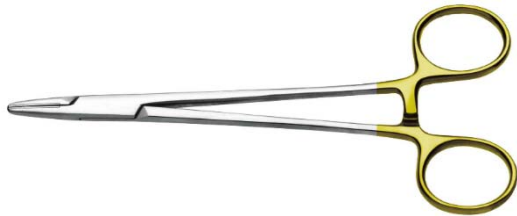


4706.15, 4706.18



4724.16, 4724.18



4740.17, 4725.17, 4741.17

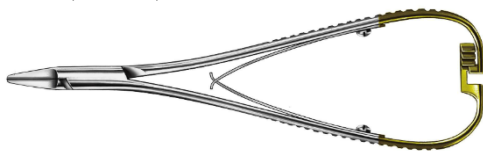

14751.61, 14751.68



14761.68, 14760.68



14750.48, 14751.48, 14760.48, 14761.48



**2.寸法

カタログ番号	カタログ名	先端最大幅(mm)
4742.17	アドバンスドテック ニードルホルダー1.5mm 17cm TC	1.5
4738.17	アドバンスドテック ニードルホルダー2.2mm 17cm TC	2.2
4743.17	アドバンスドテック ニードルホルダー曲 1.5mm 17cm TC	1.5
4739.17	アドバンスドテック ニードルホルダー曲 2.2mm 17cm TC	2.2
4719.12	オルセンヘガー ニードルホルダー2.5mm 12cm TC	2.5
4719.14	オルセンヘガー ニードルホルダー2.5mm 14cm TC	2.5
4719.16	オルセンヘガー ニードルホルダー2.5mm 16cm TC	2.5
14748.15	カストロビジョ ニードルホルダー1.2mm 15cm TC	1.2
14748.18	カストロビジョ ニードルホルダー1.2mm 18cm TC	1.2
14747.15	カストロビジョ ニードルホルダー2.2mm 15cm TC	2.2
14749.15	カストロビジョ ニードルホルダー曲 1.2mm 15cm TC	1.2
14749.18	カストロビジョ ニードルホルダー曲 1.2mm 18cm TC	1.2
14758.15	カストロビジョ マイクロニードルホルダー0.8mm 15cm TC	0.8
14758.18	カストロビジョ マイクロニードルホルダー0.8mm 18cm TC	0.8
14759.15	カストロビジョ マイクロニードルホルダー曲 0.8mm 15cm TC	0.8
4710.15	クライルウッド ニードルホルダー2mm 15cm TC	2.0
4710.18	クライルウッド ニードルホルダー2mm 18cm TC	2.0
4704.18	サロット ニードルホルダー2mm 18cm TC	2.0
14760.18	ズッケリ マイクロニードルホルダー0.6mm 18cm TC	0.6
4707.12	デルフ ニードルホルダー1.8mm 12cm TC	1.8
4760.15	ニードルホルダー ダイヤモンドコート1mm 14.5cm	1.0
14744.18	バラッケル/シュメルツァイゼン持針器 1.2mm 18 cm TC	1.2
14745.15	バラッケル ニードルホルダー1.2mm 15cm TC	1.2
14745.18	バラッケル ニードルホルダー1.2mm 18cm TC	1.2
14745.28	バラッケル ニードルホルダー2.0mm 18cm TC	2.0
14746.01	バラッケルニードルホルダー曲 1.2mm18cmTC J-Spec	1.2
14746.15	バラッケル ニードルホルダー曲 1.2mm 15cm TC	1.2
14746.18	バラッケル ニードルホルダー曲 1.2mm 18cm TC	1.2
14750.18	バラッケル マイクロニードルホルダー0.8mm 18cm	0.8

	TC	
14751.15	バラッケル マイクロニードルホルダー曲 0.8mm 15cm TC	0.8
14751.18	バラッケル マイクロニードルホルダー曲 0.8mm 18cm TC	0.8
4714.00	ヘーゼル ニードルホルダー2mm 21cm TC	2.0
4712.00	ヘーゼル ニードルホルダー曲 2mm 21cm TC	2.0
4708.14	マイクロバスキュラー ニードルホルダー1.2mm 15cm TC	1.2
4708.18	マイクロバスキュラー ニードルホルダー1.2mm 18cm TC	1.2
4723.14	マチュー ニードルホルダー2.2mm 14cm TC	2.2
4723.17	マチュー ニードルホルダー2.5mm 17cm TC	2.5
4701.14	マチュー ニードルホルダー2.2mm 14cm	2.2
4701.17	マチュー ニードルホルダー2.5mm 17cm	2.5
4709.16	メイヨーヘガー ニードルホルダー2.5mm 16cm TC	2.5
4709.18	メイヨーヘガー ニードルホルダー2.5mm 18cm TC	2.5
4706.15	ライダー ニードルホルダー1.5mm 15cm TC	1.5
4706.18	ライダー ニードルホルダー1.5mm 18cm TC	1.5
4724.16	ランゲンベック ニードルホルダー2mm 16cm TC	2.0
4724.18	ランゲンベック ニードルホルダー2mm 18cm TC	2.0
4740.17	リヒテンベルグ ニードルホルダー1.3mm 17cm TC	1.3
4725.17	リヒテンベルグ ニードルホルダー2mm 17cm TC	2.0
4741.17	リヒテンベルグ ニードルホルダー曲 2mm 17cm TC	2.0
14751.61	バラッケル MC 持針器曲 0.8mm18cmDA DL Jspec	0.8
14751.68	バラッケル MC ニードルホルダー曲 0.8mm 18cmDIA DL	0.8
14761.68	ズッケリ UF ニードルホルダー 0.5mm 18cm DIA DL	0.5
14760.68	ズッケリ MC ニードルホルダー 0.6mm 18cm DIA DL	0.6
14750.48	バラッケル MC ニードルホルダー0.8mm 18cm TC HL	0.8
14751.48	バラッケル MC ニードルホルダー曲 0.8mm 18cm TC HL	0.8
14760.48	ズッケリ MC ニードルホルダー0.6mm 18cm TC HL	0.6
14761.48	ズッケリ UFニードルホルダー0.5mm 18cm TC HL	0.5

3.組成

ステンレス鋼、タングステンカーバイド、チタン合金、ダイヤモンド、DLC コーティング

【使用目的又は効果】

本品はハンドル部を握ることにより先端部にて縫合針を把持する目的で設計された手術器具である。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件： 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 本品のハンドル部を操作し、先端部を開閉して縫合針を把持し、縫合を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎに

- は、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
 6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
 7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
 8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸 入 先 国 : ドイツ

輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)