



機械器具 35 医療用はさみ

一般医療機器 はさみ (35325001)

STM ハサミ

***【形状・構造及び原理等】

***1.形状

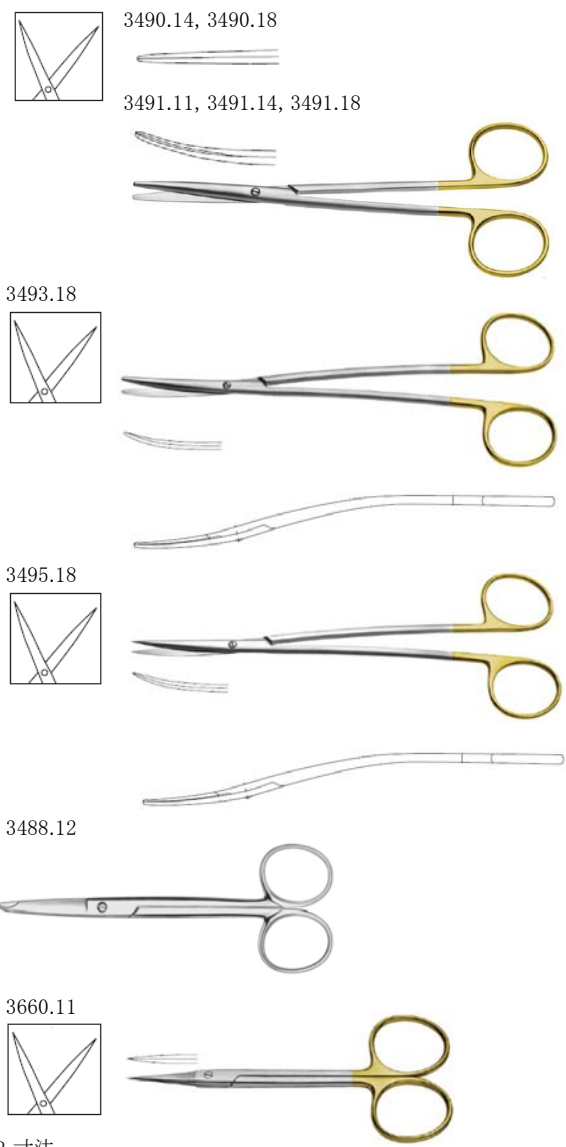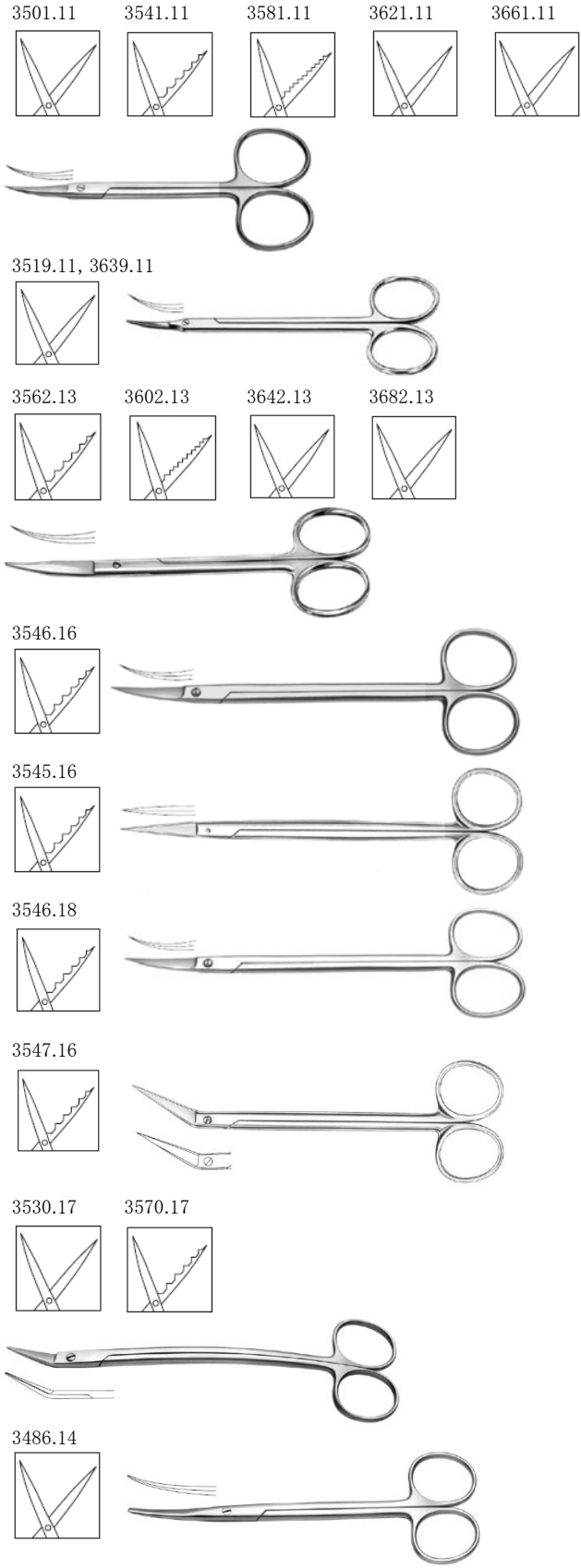

***2.寸法

カタログ番号	カタログ名	全長(cm)
3501.11	アイリス 曲 Smooth	11.5
3541.11	アイリス 曲 鋸歯	11.5
3581.11	アイリス 曲 SC	11.5
3621.11	アイリス 曲 WC	11.5
3661.11	アイリス 曲 TC	11.5
3519.11	シャープポイント 曲 Smooth	11.5
3639.11	シャープポイント 曲 WC	11.5
3562.13	ゴールドマンフォックス 曲 鋸歯	13.0
3602.13	ゴールドマンフォックス 曲 SC	13.0
3642.13	ゴールドマンフォックス 曲 WC	13.0
3682.13	ゴールドマンフォックス 曲 TC	13.0
3546.16	ケリー 曲 16cm 鋸歯	16.0
3545.16	ケリー 16cm 鋸歯	16.0
3546.18	ケリー 曲 18cm 鋸歯	18.0
3547.16	ケリー アンゲル 16cm 鋸歯	16.0
3530.17	ディーシアン アンゲル Smooth	17.0
3570.17	ディーシアン アンゲル 鋸歯	17.0
3486.14	メッツエンバウム 曲	14.5
3490.14	メッツエンバウム フィーノ 14cm TC	14.0
3490.18	メッツエンバウム フィーノ 18cm TC	18.0
3491.11	メッツエンバウム フィーノ 曲 11.5cm TC	11.5
3491.14	メッツエンバウム フィーノ 曲 14cm TC	14.0

3491.18	メッツエンバウム フィーノ 曲 18cm TC	18.0
3493.18	メッツエンバウム フィーノ S 曲 鈍 18cm TC	18.0
3495.18	メッツエンバウム フィーノ S 曲 鋭 18cm TC	18.0
3488.12	スペンサー スーチャーリムービングシザー 12cm	12.0
3660.11	アイリス TC	11.5

3.組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は回転軸のある2枚の刃からなり、切断する材料の上で2枚の刃を閉じることによって操作し、手術時の組織、布、縫合糸等の切断に用いることを目的とした手術器具である。ハンドル部には指を入れるタイプと、握って使用するタイプがある。また、先端刃部形状には様々なものがある。

*【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20分間
134℃ 5分間
2. 本品のハンドル部を操作し、先端部を開閉して組織、布、縫合糸等を切断する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレープ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インブラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505
輸 入 先 国 : ドイツ
輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)