
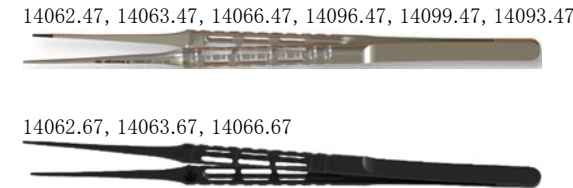
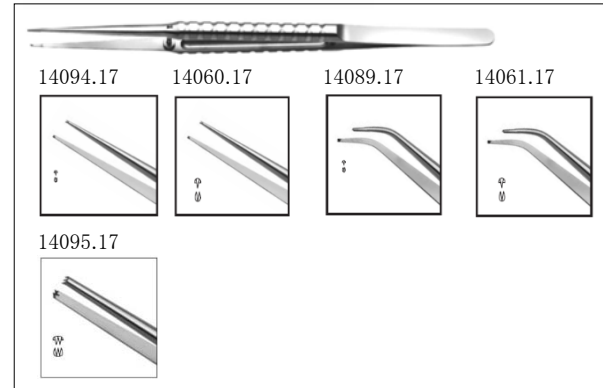
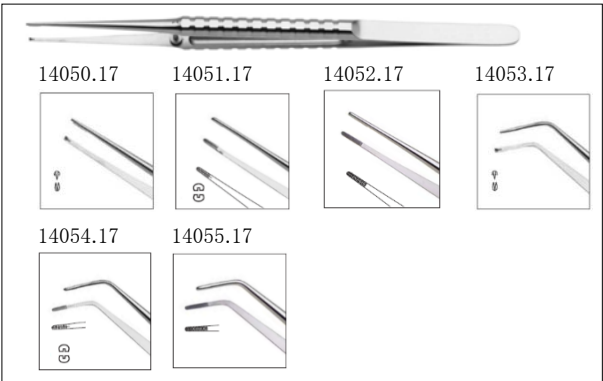
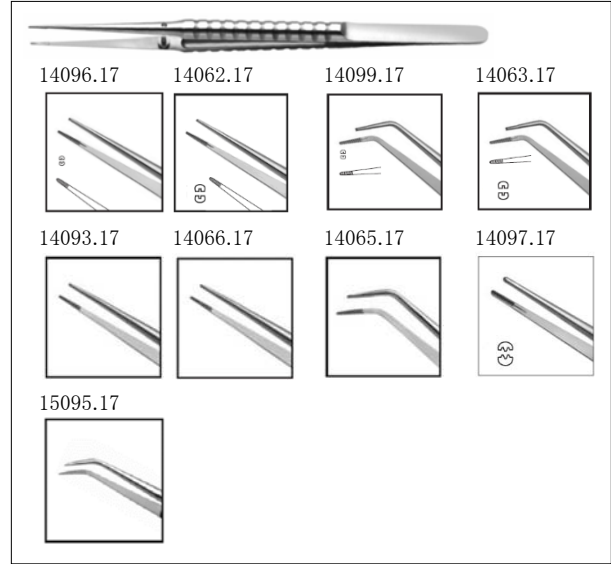


機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット(35079001)

STM 治療用ピンセット

【形状・構造及び原理等】

1.形状

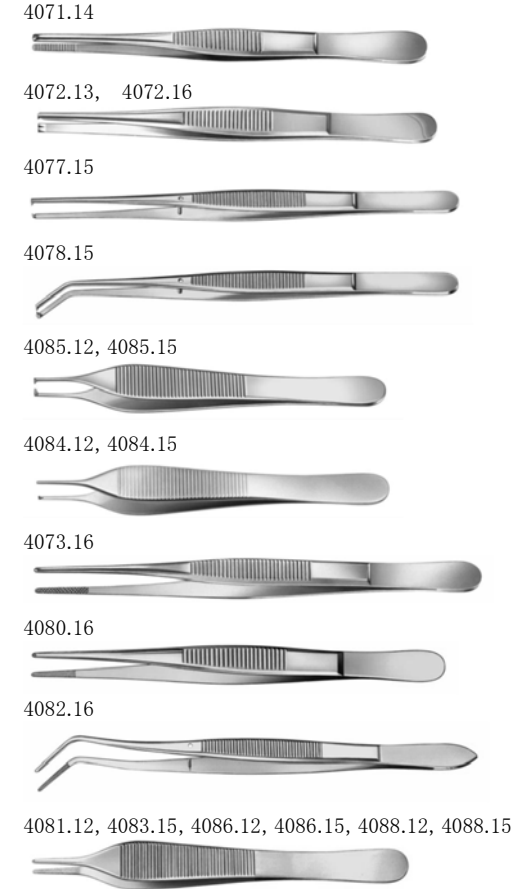

***2.寸法

カタログ 番号	カタログ名	先端幅 (mm)
4071.14	ディセクティングフォーセブス 14.5cm	—
4072.13	ティッシュフォーセブス 有鉤 13cm	2.0
4072.16	ティッシュフォーセブス 有鉤 16cm	2.0
4077.15	セムケン フォーセブス 有鉤	1.5
4078.15	セムケン フォーセブス 曲 有鉤	1.5
4085.12	アドソン 有鉤 1.5mm 12cm	1.5
4085.15	アドソン 有鉤 1.5mm 15cm	1.5
4084.12	マイクロアドソン 有鉤 0.8mm 12cm	0.8
4084.15	マイクロアドソン 有鉤 0.8mm 15cm	0.8
カタログ 番号	カタログ名	全長 (cm)
4073.16	ディセクティングフォーセブス クロスグループ 16cm	16.0
4080.16	ディセクティングフォーセブス 16cm TC	16.0
4082.16	メリアム 16cm TC	16.0
4081.12	アドソン 12cm TC	12.0
4083.15	アドソン 15cm TC	15.0
4086.12	アドソン 無鉤 12cm	12.0
4086.15	アドソン 無鉤 15cm	15.0
4088.12	マイクロアドソン 無鉤 12cm	12.0
4088.15	マイクロアドソン 無鉤 15cm	15.0
カタログ 番号	カタログ名	先端幅 (mm)
14096.17	クーリー マイクロフォーセブス 0.8mm hy-grip	0.8
14062.17	クーリー マイクロフォーセブス 0.6mm hy-grip	0.6
14099.17	クーリー マイクロフォーセブス 曲 0.8mm hy-grip	0.8
14063.17	クーリー マイクロフォーセブス 曲 0.6mm hy-grip	0.6
14093.17	マイクロフォーセブス 0.8mm TC hy-grip	0.8
14066.17	マイクロフォーセブス 0.6mm TC hy-grip	0.6
14065.17	マイクロフォーセブス 曲 0.8mm TC hy-grip	0.8
14097.17	ドベイキー マイクロフォーセブス 1.8mm hy-grip	1.8
15095.17	コレージ マイクロフォーセブス 曲 hy-grip	1.8
4106.12	アドソン 有鉤 1.5mm 12cm TC	1.5
4103.12	アドソンブラウン 無鉤 12cm	1.5
14050.17	フォーセブス 有鉤 hy-grip	1.3
14051.17	クーリー フォーセブス hy-grip	1.3
14052.17	フォーセブス TC hy-grip	1.3
14053.17	フォーセブス 曲 有鉤 hy-grip	1.3
14054.17	クーリー フォーセブス 曲 hy-grip	1.3
14055.17	フォーセブス TC 曲 hy-grip	1.3
カタログ 番号	カタログ名	先端内 径(mm)
14140.17	サラマ コーン フォーセブス hy-grip	1.3
カタログ 番号	カタログ名	全長 (cm)
14120.17	ルッセ メンブレンホールディングフォーセブス hy-grip	17.8
4079.12	セムケン 曲 12cm	12.0
カタログ 番号	カタログ名	先端幅 (mm)
14094.17	マイクロフォーセブス 有鉤 0.8mm hy-grip	0.8
14060.17	マイクロフォーセブス 有鉤 0.6mm hy-grip	0.6
14089.17	マイクロフォーセブス 曲 有鉤 0.8mm hy-grip	0.8
14061.17	マイクロフォーセブス 曲 有鉤 0.6mm hy-grip	0.6
14095.17	マイクロフォーセブス 有鉤 2.6mm hy-grip	2.6
カタログ 番号	カタログ名	先端内径 (mm)
4736.16	スーチャーツイザー φ 1.6mm	1.6
4736.22	スーチャーツイザー φ 2.2mm	2.2
カタログ 番号	カタログ名	先端幅 (mm)
4090.16	ドベイキー ツイザー	2.0
4091.16	ドベイキー ツイザー 曲	2.0
カタログ 番号	カタログ名	先端内径 (mm)

14142.17	ティッシュグラスビンギン/スーチャーツイザー φ 2.0mm hy-grip	2.0
カタログ 番号	カタログ名	先端幅 (mm)
14136.17	クーリー シュメルツアイゼン ティッシュフォーセブス φ 0.8mm hy-grip	0.8
カタログ 番号	カタログ名	先端幅 (mm)
14062.67	クーリー マイクロフォーセブス 0.6mm dark line	0.6
14063.67	クーリー マイクロフォーセブス 曲 0.6mm dark line	
14066.67	クーリー マイクロフォーセブス 0.6mm DIA dark line	
14062.47	クーリー マイクロフォーセブス 0.6mm hy-light	0.6
14063.47	クーリー マイクロフォーセブス 曲 0.6mm hy-light	
14066.47	TC マイクロフォーセブス 0.6mm hy-light	
14096.47	クーリー マイクロフォーセブス 0.8mm hy-light	0.8
14099.47	クーリー マイクロフォーセブス 曲 0.8mm hy-light	
14093.47	TC マイクロフォーセブス 0.8mm hy-light	

3.組成

ステンレス鋼, タングステンカーバイド, DLC コーティング

【使用目的又は効果】

綿花、綿球、歯肉などの組織片等を把持するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 本品の把持部を手指により把持し、先端部に組織等を把持する。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :ドイツ
輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)