

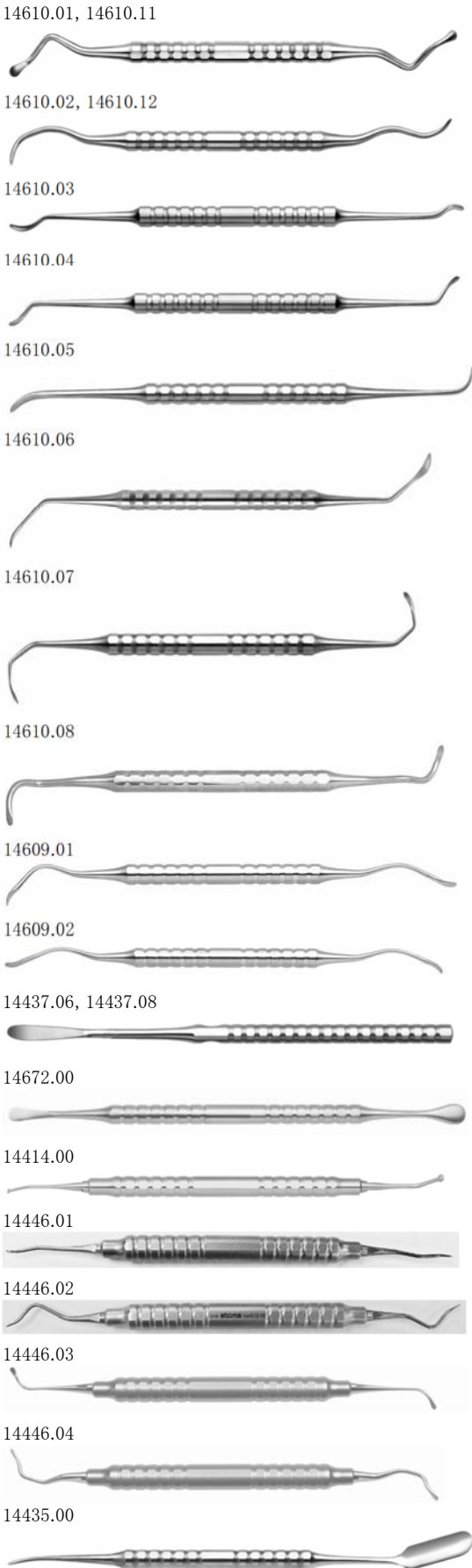


機械器具 42 医療用剥離子  
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子(70683000)

STM 剥離子

【形状・構造及び原理等】  
1.形状

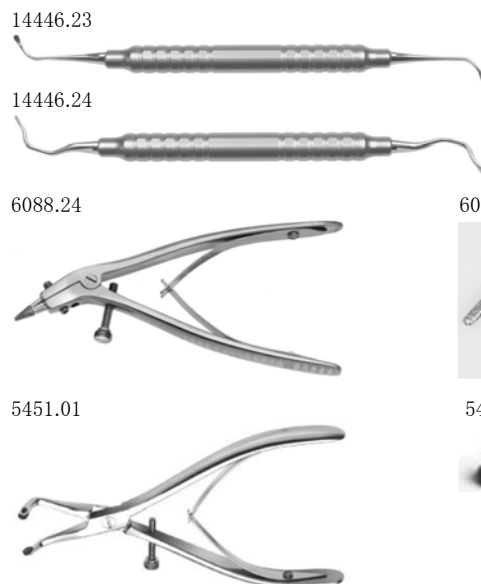

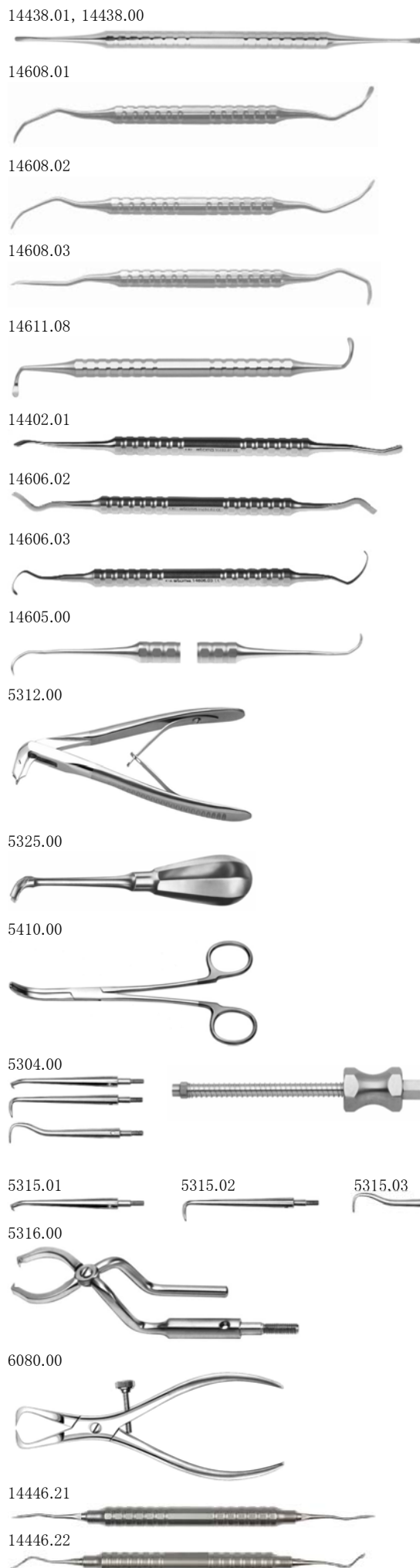

## 2.寸法

| カタログ<br>番号 | カタログ名                                     | 先端幅<br>(mm) |
|------------|-------------------------------------------|-------------|
| 14431.00   | ラスパトリウム 4mm/ロードスバックアクション<br>チゼル hy-grip   | 4.0/-       |
| 14419.03   | デワイズ 3/3mm hy-grip                        | 3.0/3.0     |
| 14419.05   | デワイズ 5/5mm hy-grip                        | 5.0/5.0     |
| 14421.01   | モルト#1 hy-grip                             | 5.0/8.0     |
| 14421.02   | モルト#2 hy-grip                             | 5.0/3.0     |
| 14421.03   | モルト#3 hy-grip                             | 5.0/4.0     |
| 14413.00   | イクルホウト マイクロ hy-grip                       | 3.0/3.0     |
| 14415.00   | フリーア hy-grip                              | 3.0/3.0     |
| 14416.00   | ブーザー hy-grip                              | 5.0/4.0     |
| 14424.00   | グリックマン hy-grip                            | 4.0/4.0     |
| 14425.00   | プリチャード PR3 hy-grip                        | 5.0/10.5    |
| 14425.03   | プリチャード PR3(穴付) hy-grip                    | 5.0/10.5    |
| 14427.00   | エモス hy-grip                               | 8.0/8.0     |
| 4418.06    | オブゲーザー 6mm 18cm                           | 6.0         |
| 4418.08    | オブゲーザー 8mm 18cm                           | 8.0         |
| 4411.00    | ウィリガー 6mm 12cm                            | 6.0         |
| 4412.04    | ウィリガー 4.5mm 16cm                          | 4.5         |
| 4412.06    | ウィリガー 6mm 16cm                            | 6.0         |
| 14418.00   | パルチ ブーザー hy-grip                          | 5.0/3.0     |
| 14422.00   | パルチ モルト hy-grip                           | 11/8.0      |
| 14421.06   | コレンテ アブンド 4/8mm 18cm hy-grip              | 4.0/8.0     |
| 14434.00   | トンネルペリオスチールエレベーター                         | 2.3/3.9     |
| 14439.00   | アレン トンネルエレベーター 2/2mm hy-grip              | 2.0/2.0     |
| 14445.00   | ジンジバグラフトパッキングインスツルメント                     | —           |
| 14610.01   | ウィル サイナスリフトエレベーター#1 3/3mm hy-<br>grip     | 3.0/3.0     |
| 14610.11   | ウィル サイナスリフトエレベーター#1 4/4mm hy-<br>grip     | 4.0/4.0     |
| 14610.02   | ウィル サイナスリフトエレベーター#2 3/3mm hy-<br>grip     | 3.0/3.0     |
| 14610.12   | ウィル サイナスリフトエレベーター#2 4/4mm hy-<br>grip     | 4.0/4.0     |
| 14610.03   | ウィル サイナスリフトエレベーター#3 4/4mm hy-<br>grip     | 4.0/4.0     |
| 14610.04   | ウィル サイナスリフトエレベーター#4 4/4mm hy-<br>grip     | 4.0/4.0     |
| 14610.05   | メミンゲン サイナスリフトエレベーター 5/4mm hy-<br>grip     | 5.0/4.0     |
| 14610.06   | マイロンネピンス サイナスリフトエレベーター#1<br>5/7mm hy-grip | 5.0/7.0     |
| 14610.07   | マイロンネピンス サイナスリフトエレベーター#2<br>5/7mm hy-grip | 5.0/7.0     |
| 14610.08   | テイタム パルチ サイナスリフトエレベーター<br>3/3mm hy-grip   | 3.0/3.0     |
| 14609.01   | パルチ サイナスキュレット 4.5/4.5mm hy-grip           | 4.5/4.5     |
| 14609.02   | パルチ サイナスキュレット 3.5/3.5mm hy-grip           | 3.5/3.5     |

|          |                                      |          |
|----------|--------------------------------------|----------|
| 14437.06 | オブゲージャー 6mm 18cm hy-grip             | 6.0      |
| 14437.08 | オブゲージャー 8mm 18cm hy-grip             | 8.0      |
| 14672.00 | オルスベルグ 5/8mm hy-grip                 | 5.0/8.0  |
| 14414.00 | パピーラエレベーター 2/3mm hy-grip             | 2.0/3.0  |
| 14446.01 | スクリーン トンネル インストルメント#1 hy-grip        | 2.0/2.5  |
| 14446.02 | スクリーン トンネル インストルメント#2 hy-grip        | 2.0/2.5  |
| 14446.03 | スクリーンアロカ トンネル インストルメント#1 hy-grip     | 2.0/2.0  |
| 14446.04 | スクリーンアロカ トンネル インストルメント#2 hy-grip     | 2.0/2.0  |
| 14435.00 | カヤット hy-grip                         | 5.0/10.5 |
| 14438.01 | ズックリ 1.5/2.0mm hy-grip               | 1.5/2.0  |
| 14438.00 | ズックリ 2.0/2.5mm hy-grip               | 2.0/2.5  |
| 14608.01 | オルスベルグ サイナスリフトエレベーター 3/3mm           | 3.0/3.0  |
| 14608.02 | オルスベルグ サイナスリフトエレベーター 3/4.5mm         | 3.0/4.5  |
| 14608.03 | オルスベルグ サイナスリフトエレベーター 4.5/4.5mm       | 4.5/4.5  |
| 14611.08 | ティンティ サイナスリフトエレベーター 3/3mm hy-grip    | 3.0/3.0  |
| 14402.01 | ルッセ ペリオスチール エレベーター 17cm hy-grip      | —        |
| 14606.02 | ルッセ サイナスキュレット#1 15.5cm hy-grip       | —        |
| 14606.03 | ルッセ サイナスキュレット#2 17cm hy-grip         | —        |
| 14605.00 | カヤット サイナスリフトエレベーター 1.5/1.5mm hy-grip | 1.5/1.5  |
| 5312.00  | クラウンスブレッディング フォーセプス                  | —        |
| 5325.00  | ユニバーサル クラウンスブレッダー                    | —        |
| 5410.00  | テンポラリーポスト除去用 フォーセプス TC               | 2.2      |
| 5304.00  | クラウンリムーバー                            | —        |
| 5315.01  | リムーバーチップ #1                          | —        |
| 5315.02  | リムーバーチップ #2                          | —        |
| 5315.03  | リムーバーチップ #3                          | —        |
| 5316.00  | クラウンリムーバー用フォーセプス                     | 3.3      |
| 6080.00  | フラー テンポラリークラウン リムービングプライヤー           | —        |
| 14446.21 | スクリーン トンネル インストルメント ミニ #1 hy-grip    | 1.5/2.0  |
| 14446.22 | スクリーン トンネル インストルメント ミニ #2 hy-grip    | 1.5/2.0  |
| 14446.23 | スクリーンアロカ トンネル インストルメント ミニ #1 hy-grip | 1.5/1.5  |
| 14446.24 | スクリーンアロカ トンネル インストルメント ミニ #2 hy-grip | 1.5/1.5  |

| カタログ番号  | カタログ名                       | 角度(°) |
|---------|-----------------------------|-------|
| 6088.24 | テレスコープ クラウンプライヤー (チップ交換タイプ) | 30    |
| 6088.54 | ダイヤモンドチップ (交換用)             | —     |

| カタログ番号  | カタログ名                       | 全長(cm) |
|---------|-----------------------------|--------|
| 5451.01 | クラウンリムービング フォーセプス(チップ交換タイプ) | 15.5   |
| 5452.00 | ラバーチップ (交換用) 20 組           | —      |

### 3. 組成

ステンレス鋼 / タングステンカーバイド / PTFE / ダイヤモンド

### 【使用目的又は効果】

本品は口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具である。

### 【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高压蒸気 滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間  
134℃ 5 分間
2. 本品を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

### 【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス  
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>  
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505  
輸入先国 : ドイツ  
輸入先製造業者: ストーマ社  
(Storz am Mark GmbH)