

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子(10861001)

STM 鉗子

【形状・構造及び原理等】

1.形状


14640.00



3256.00, 3256.08, 3256.10



14642.00

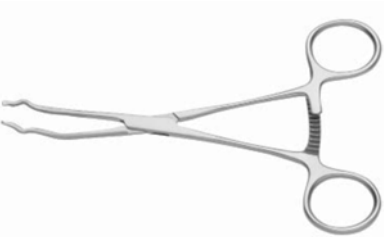

3840.08, 3840.13



3845.15



3841.10



2.寸法

カタログ番号	カタログ名	全長 (cm)
14640.00	パルチ ボーンブロックフォーセプス	13.5
3256.00	ボーンブロックフォーセプス	12.5
3256.08	ボーンブロックフォーセプス レフト	12.5
3256.10	ボーンブロックフォーセプス ライト	12.5
14642.00	バース ボーンブロックフォーセプス	15
3840.08	バックハウス 穿孔型タオルクランプ 9cm	9.0
3840.13	バックハウス 穿孔型タオルクランプ 13cm	13
3845.15	アリス ティッシュグラスピングフォーセプス 15cm	15
3841.10	トーホク タオルクランプ 10cm	10

3.組成
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するため

に用いる手術器具である。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高压蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 本品先端部で骨等の組織を把持、結合、圧迫又は支持する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げるすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :ドイツ
輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)