

機械器具 34 医療用刀
一般医療機器 メス(35130001)

STM ティッシュパンチ


**【形状・構造及び原理等】

**1.形状

13388.03 13388.04 13388.05 13388.06



6668.01

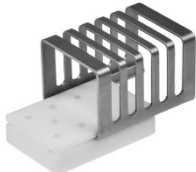

**2.寸法

一連 番号	カタログ 番号	カタログ名	直径 (mm)
1	13388.03	パルチ ティッシュパンチ CA φ3mm	3.0
2	13388.04	パルチ ティッシュパンチ CA φ4mm	4.0
3	13388.05	パルチ ティッシュパンチ CA φ5mm	5.0
4	13388.06	パルチ ティッシュパンチ CA φ6mm	6.0
5	※6668.01	ティッシュパンチラック	—

※雑品

3. 組成
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は円筒状の先端に刃を持ち、歯肉等の軟組織の切断及び切離に用いる手術器具である。

*【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件： 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 本品に専用ハンドルを装着し、歯肉粘膜に押し付け、回転させて軟組織を切断・切離する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は使用前に芯ぶれなどに支障のないことを確認すること。使用に適さない場合には新品と交換すること。
- 2) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正回転数(800～1,200rpm)にて使用すること。
- 3) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な

- 濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
 4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
 5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
 6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
 7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
 8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :ドイツ
輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)