

STM ペリオトーム

*【形状・構造及び原理等】

*1.形状

12965.00



12965.10



12966.00



12966.10



12967.00



12967.10



12960.00, 12960.10



12962.00, 12962.10



12961.00, 12961.10



【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インブラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸入先国 : ドイツ

輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)

*2.寸法

カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)
12965.00	ペリオトーム#1 φ 8mm hy-grip	2
12965.10	ペリオトーム#1 φ 10mm hy-grip	2
12966.00	ペリオトーム#2 φ 8mm hy-grip	2
12966.10	ペリオトーム#2 φ 10mm hy-grip	2
12967.00	ペリオトーム#3 φ 8mm hy-grip	2
12967.10	ペリオトーム#3 φ 10mm hy-grip	2
カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)
12960.00	ペリオトーム#1 2/2mm φ 8mm hy-grip	2/2
12960.10	ペリオトーム#1 2/2mm φ 10mm hy-grip	2/2
12962.00	ペリオトーム#2 2/2mm φ 8mm hy-grip	2/2
12962.10	ペリオトーム#2 2/2mm φ 10mm hy-grip	2/2
12961.00	ペリオトーム#3 2/2mm φ 8mm hy-grip	2/2
12961.10	ペリオトーム#3 2/2mm φ 10mm hy-grip	2/2

*3.組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具である。

**【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 本品を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。