

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子(70683000)
歯肉切除メス(41544000)

チームアトランタ トンネルキット

**【形状・構造及び原理等】

*1.形状

19604.03



14439.00



14445.00



14441.00



14442.00



14443.00



2991.07



ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具である。

*【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。

推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間

2. 本品を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等の除去を行う。

3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。

2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。

2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。

3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。

4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。

5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。

6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。

7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。

8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス

ホームページ: <http://www.itx.co.jp>

TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸入先国 : ドイツ

輸入先製造業者: ストーマ社

(Storz am Mark GmbH)

**2.構成品

チームアトランタ トンネルキット (19604.03)

カタログ 番号	カタログ名	先端幅 (mm)	届出番号
14439.00	アレン トンネルエレベーター 2/2mm hy-grip	2.0/2.0	13B1X00053 C00013
カタログ 番号	カタログ名	全長 (cm)	届出番号
14445.00	ジンジバグラフトパッキングイン スツルメント	16.0	13B1X00053 C00013
カタログ 番号	カタログ名	ハンドル径 (mm)	届出番号
14441.00	歯肉切除用ナイフ #1 hy-grip	10	13B1X00053 C00062
14442.00	歯肉切除用ナイフ φ 2/2mm hy-grip	10	
14443.00	歯肉切除用ナイフ #2 hy-grip	10	
※ 2991.07	p.i.c.トレイ 180×86×30mm ク ランプクリップ式		

※雑品

3.組成