


機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 (70683000)

STM インstrument (三好インプラントコンセプト外科 Stoma キット)

【形状・構造及び原理等】

1.形状

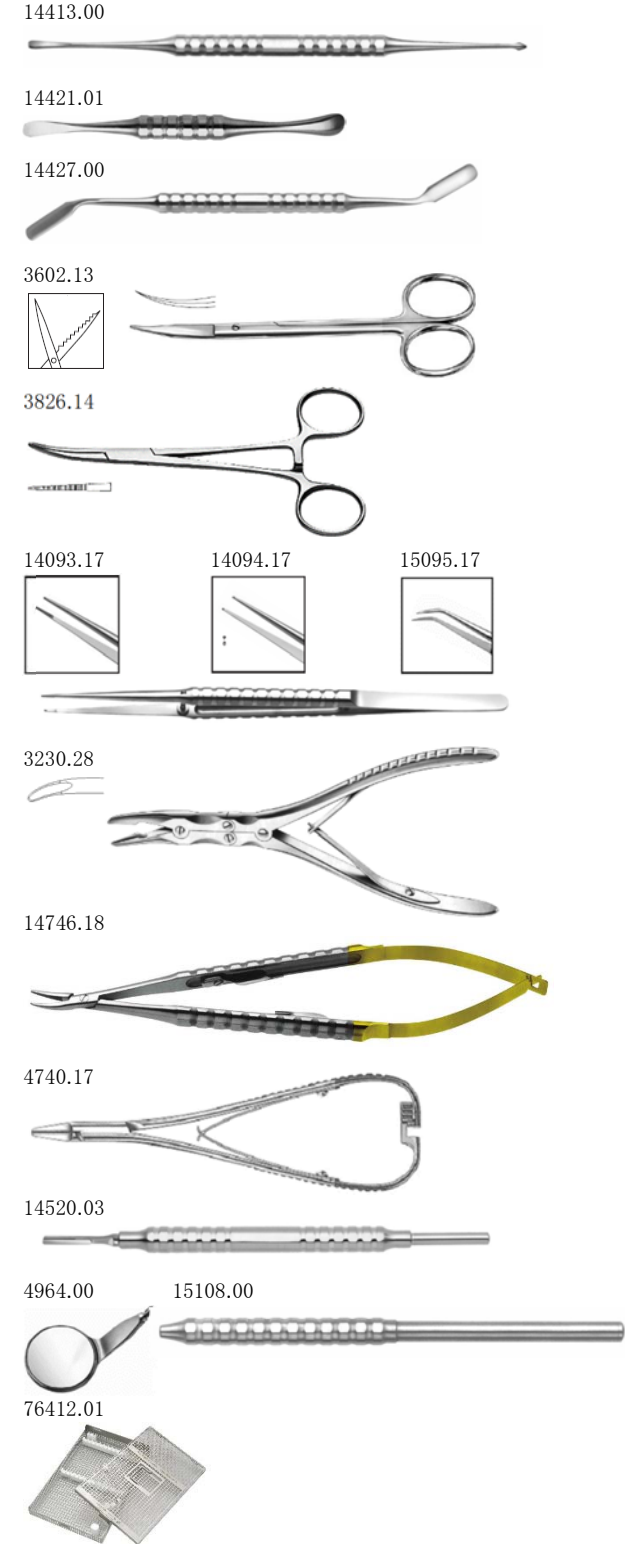

2.構成品

三好インプラントコンセプト外科 Stoma キット (49714.00)

No.	カタログ番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	先端幅 (mm)
1	14413.00	イクルホウト マイクロ hy-grip	歯科用起子及び剥離子 (70683000)	3.0/3.0
2	14421.01	モルト#1 hy-grip		5.0/8.0
3	14427.00	エモス hy-grip		8.0/8.0

No.	カタログ番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	全長 (cm)
4	3602.13	ゴールドマンフォックス 曲 SC	はさみ (35325001)	13.0
5	3826.14	ケリー 14cm	鉗子 (10861001)	14.0
No.	カタログ番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	先端幅 (mm)
6	14093.17	マイクロフォーセプス 0.8mm TC hy-grip	ピンセット (35079001)	0.8
7	14094.17	マイクロフォーセプス 有鉤 0.8mm hy-grip		0.8
8	15095.17	コレージ マイクロフォーセプス 曲 hy-grip		1.8
No.	カタログ番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	全長 (cm)
9	3230.18	ペイヤー ダブルアクション ラウンド 18cm	手術用鉗子 (32853000)	18
No.	カタログ番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	先端最大幅 (mm)
10	14746.18	バラッセル ニードルホルダー 曲 1.2mm 18cm TC	持針器 (12726010)	1.2
11	4740.17	リヒテンベルグ ニードルホルダー 1.3mm 17cm TC		1.3
No.	カタログ番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	ハンドル部径 (mm)
12	14520.03	スカルペルブレードホルダー φ 10mm hy-grip	ナイフハンドル (12235000)	10
No.	カタログ番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	ミラーヘッド径 (mm)
13	4964.00	メガデュオミラー ロジウム 平面 φ 22mm 6 ｲﾝﾁ	歯鏡 (31776000)	22
No.	カタログ番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	ハンドル径 (mm)
14	15108.00	ミラーハンドル φ 8mm hy-grip	歯鏡 (31776000)	8.0
15	※ 76412.01	三好インプラントコンセプト外科キット 用トレイ	—	—

※雑品

3. 組成

ステンレス鋼、タングステンカーバイド、ガラス、ロジウム加工ガラス

【使用目的又は効果】

口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具である。

【使用方法等】

- 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
- 本品を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等を行う。
- 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 塩素系及び過酸化水素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・

- 消毒すること。可動部分等は開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
 3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
 4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
 5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
 6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
 7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
 8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インブラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸入先国 : ドイツ

輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)