


機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 (70683000)
はさみ(35325001)/ 鉗子(10861001)/ ピンセット(35079001)/ 手術用鉗子(32853000)/ 持針器(12726010)/
ナイフハンドル(12235000)/ 歯鏡(31776000)

STM インスツルメント（三好インプラントコンセプト外科 Stoma キット）

*【形状・構造及び原理等】

1.形状

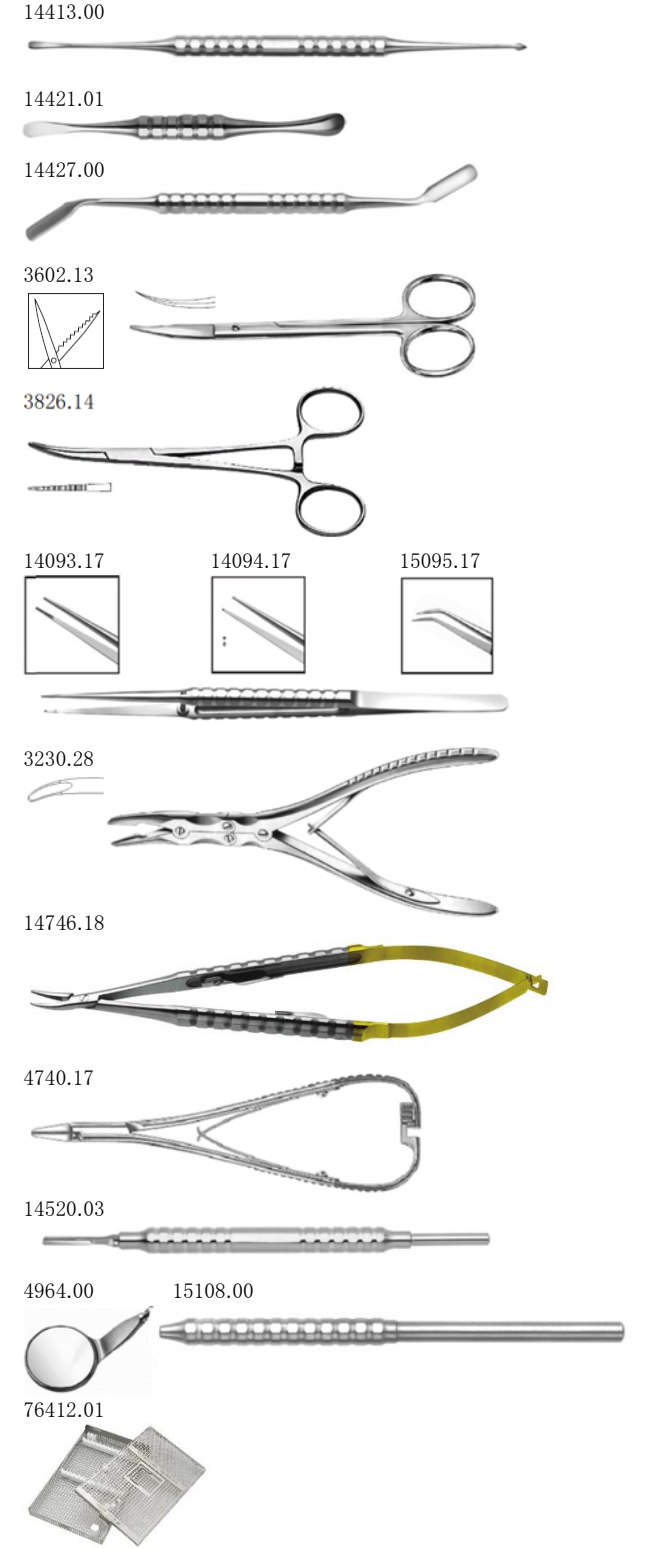

*2.構成品

三好インプラントコンセプト外科 Stoma キット（49714.00）

No.	カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)	届出番号
1	14413.00	イクルホウト マイクロ hy-grip	3.0/3.0	13B1X00053
2	14421.01	モルト#1 hy-grip	5.0/8.0	C00013
3	14427.00	エモス hy-grip	8.0/8.0	

No.	カタログ番号	カタログ名	全長(cm)	届出番号
4	3602.13	ゴールドマンフォックス 曲 SC	13.0	13B1X00053C00006
5	3826.14	ケリー 14cm	14.0	13B1X00053C00002
No.	カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)	届出番号
6	14093.17	マイクロフォーセプス 0.8mm TC hy-grip	0.8	13B1X00053C00008
7	14094.17	マイクロフォーセプス 有鉤 0.8mm hy-grip	0.8	
8	15095.17	コレージ マイクロフォーセプス 曲 hy-grip	1.8	
No.	カタログ番号	カタログ名	全長(cm)	届出番号
9	3230.18	バイヤー ダブルアクション ラウンド 18cm	18	13B1X00053C00001
No.	カタログ番号	カタログ名	先端最大幅(mm)	届出番号
10	14746.18	バラッケル ニードルホルダー 曲 1.2mm 18cm TC	1.2	13B1X00053C00005
11	4740.17	リヒテンベルグ ニードルホルダー 1.3mm 17cm TC	1.3	
No.	カタログ番号	カタログ名	ハンドル部径(mm)	届出番号
12	14520.03	スカルペルブレードホルダー φ 10mm hy-grip	10	13B1X00053C00016
No.	カタログ番号	カタログ名	ミラーヘッド径(mm)	届出番号
13	4964.00	メガデュオミラー ロジウム 平面 φ 22mm 6 ｲﾝﾁ	22	13B1X00053C00011
No.	カタログ番号	カタログ名	ハンドル径(mm)	届出番号
14	15108.00	ミラーハンドル φ 8mm hy-grip	8.0	13B1X00053C00011
15	※ 76412.01	三好インプラントコンセプト外科キット用トレイ		

※雑品

3. 組成

ステンレス鋼、タングステンカーバイド、ガラス、ロジウム加工ガラス

【使用目的又は効果】

口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具である。

【使用方法等】

- 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件： 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
- 本品を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等を行う。
- 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸入先国 : ドイツ

輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)