

機械器具 42 医療用剥離子

一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 (70683000)

歯周用キュレット(31904000)/ ピンセット(35079001)/ はさみ(35325001)/ 鉗子(10861001)/ 持針器(12726010)/ のみ(10824000)/ やすり(11701001)/
歯肉切除メス(41544000)/ ナイフハンドル(12235000)/ 歯周ポケットプローブ(31848000)/ 歯科用歯肉はさみ(31822000)/
歯科用インプラント手術器具(70965001)

STM インスツルメント (Prof. 申式歯周外科キット BASIC、ADVANCE)

**【形状・構造及び原理等】

1.形状

7755.00



7761.00



14416.00



4079.12



3602.13



4710.15



12837.00




12941.00



12930.00



76409.00

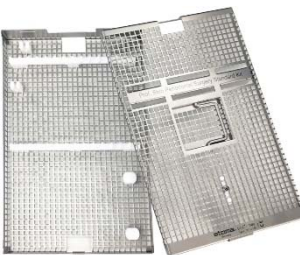

14413.00



14441.00



13551.16



14510.00



14751.18



7757.00



7763.00



14425.00



14051.17



3805.14



12903.00



14514.03



49709.00



14439.00



14442.00



14062.17




14616.00



76408.00



49709.01

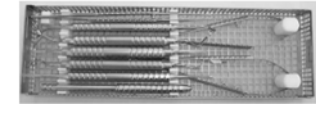

**2.構成品

Prof. 申式歯周外科キット BASIC (49709.00)

No.	カタログ番号	カタログ名	ハンドル部径(mm)	届出番号
1	7755.00	グレイシーキュレット GRC5-6 φ 8mm (黄)	8.0	13B1X00053 C00024
2	7757.00	グレイシーキュレット GRC7-8 φ 8mm (緑)	8.0	
3	7761.00	グレイシーキュレット GRC11-12 φ 8mm (紫)	8.0	
4	7763.00	グレイシーキュレット GRC13-14 φ 8mm (紺)	8.0	

No.	カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)	届出番号
5	14416.00	ブーザー hy-grip	5.0/4.0	13B1X00053
6	14425.00	ブリチャード PR3 hy-grip	5.0/10.5	C00013

No.	カタログ番号	カタログ名	全長(cm)	届出番号
7	4079.12	セムケン 曲 12cm	12.0	13B1X00053 C00008
8	14051.17	クーリー フォーセプス hy-grip	17.0	13B1X00053 C00006
9	3602.13	ゴールドマンフォックス 曲 SC	13.0	
10	3805.14	ハルステッドモスキート 曲 14cm	14.0	13B1X00053 C00002
11	4710.15	クライルウッド ニードルホルダー 2mm 15cm TC	15.0	13B1X00053 C00005

No.	カタログ番号	カタログ名	刃部幅(mm)	届出番号
12	12837.00	ロードス バックアクション 36-37 hy-grip	3.0/3.0	13B1X00053 C00007

No.	カタログ番号	カタログ名	ハンドル部径(mm)	届出番号
13	12903.00	ヒルシュフェルドファイル 3-7 hy-grip	8.0	13B1X00053 C00010
14	12941.00	オープン 歯肉切除用ナイフ O1-2 hy-grip	8.0	13B1X00053 C00062
15	14514.03	スカルペルブレードホルダー φ 8mm hy-grip	8.0	13B1X00053 C00016

No.	カタログ番号	カタログ名	先端部目盛り(mm)	届出番号
16	12930.00	ペリオプローブ PNC/EX3A イク ルホウト hy-grip	1-2-...- 14-15/-	13B1X00053 C00061
17	※ 76409.00	歯周外科キット(BASIC)トレイ		

※雑品

Prof. 申式歯周外科キット ADVANCE (49709.01)

No.	カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)	届出番号
1	14413.00	イクルホウト マイクロ hy-grip	3.0/3.0	13B1X00053 C00013
2	14439.00	アレン トンネルエレベーター 2/2mm hy-grip	2.0/2.0	

No.	カタログ番号	カタログ名	ハンドル部径(mm)	届出番号
3	14441.00	歯肉切除用ナイフ #1 hy-grip	10	13B1X00053 C00062
4	14442.00	歯肉切除用ナイフ φ 2/2mm hy- grip	10	

No.	カタログ 番号	カタログ名	全長(cm)	届出番号
5	13551.16	ゴメル マイクロシサー 曲 16cm hy-grip	16.0	13B1X00053 C00057
6	14062.17	クーリー マイクロフォーセプス 0.6mm hy-grip	17.5	13B1X00053 C00008

No.	カタログ 番号	カタログ名	ハンドル部 径(mm)	届出番号
7	14510.00	マイクロスカルペルブレードホルダー φ8mm hy-grip	8.0	13B1X00053 C00016

No.	カタログ 番号	カタログ名	先端径 (mm)	届出番号
8	14616.00	ピーラーボーングラフトパッカー/ス プーン hy-grip	3.0/-	13B1X00053 C00031

No.	カタログ 番号	カタログ名	全長(cm)	届出番号
9	14751.18	パラッセル マイクロニードルホルダー 曲 0.8mm 18cm TC	18.0	13B1X00053 C00005
10	※ 76408.00	歯周外科キット(ADVANCE) トレイ		

※雑品

3.組成

ステンレス鋼、タングステンカーバイド、PEEK

【使用目的又は効果】

口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具である。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件： 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 本品を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は、開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :ドイツ

輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)