

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 (70683000)

STM インスツルメント（北海道形成歯科研究会外科キット）

【形状・構造及び原理等】

1.形状



2.構成品

No.	カタログ 番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	先端幅 (mm)
1	14416.00	ブーザー hy-grip	歯科用起子及 び剥離子 (70683000)	5.0/4.0
2	14425.00	ブリチャード PR3 hy-grip		5.0/10.5
No.	カタログ 番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	全長 (cm)
3	3546.16	ケリー 曲 16cm 鋸歯	はさみ (35325001)	16
4	3800.12	ハルステッドモスキート 12cm	鉗子 (10861001)	12
5	3805.12	ハルステッドモスキート 曲 12cm	鉗子 (10861001)	12
6	14051.17	クーリー フォーセプス hy-grip	ピンセット (35079001)	17
7	15095.17	コレージ マイクロフォーセ プス 曲 hy-grip	ピンセット (35079001)	17
8	14746.18	バラックル ニードルホルダ ー 曲 1.2mm 18cm TC	持針器 (12726010)	18

No.	カタログ 番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	ハンドル部 径(mm)
9	14514.03	スカルペルブレードホル ダー φ 8mm hy- grip	ナイフハンドル (12235000)	8.0
No.	カタログ 番号	カタログ名	一般的名称 (JMDN コード)	全長 (cm)
10	4052.40	ランゲンベック リトラク ター 40×11mm	開創又は開孔 用器具 (13380000)	22
11	※ 76449.00	北海道形成歯科研究 会外科キットトレイ	-	-

※雑品

3.組成

ステンレス鋼
タングステンカーバイド

【使用目的又は効果】

口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具である。

【使用方法等】

- 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
- 本品を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等を行う。
- 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は、開放し汚れを残留させないこと。
- 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
- 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
- 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インブラテックス
ホームページ:http://www.itx.co.jp
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :ドイツ
輸入先製造業者:ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)