

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 (70683000)
手術用クラウンドリルビット(37871001)/ 手術用骨鉗子(32853000)/ 歯科用開創器(13380000)/ 持針器(12726010)/ のみ(10824000)/
ピンセット(35079001)/ つち(11947010)/ ナイフハンドル(12235000)/ 歯科用キュレット(31904000)/ 歯科用インプラント手術器具(70965001)/
歯科用歯肉はさみ(31822000)/ 歯周ポケットプローブ(31848000)/ 骨刀(12844000)

STM インスツルメント (フライブルグキット)

【形状・構造及び原理等】

1.形状

16610.00 (Freiburg Kit)



3230.14



4053.55



14744.18



3545.16



13321.14



13321.18

14091.17



14136.17



14096.17



3318.17



14427.00



14418.00



14422.00



14514.03



14621.30



12961.00



14618.00



13553.16



12930.00



14615.00



76423.00



6671.25



6668.05



** 2.構成品

トレフィンドリルセット C27

カタログ番号	カタログ名	内径/外径 (mm)	届出番号
22349.03	トレフィンドリル φ 3/4mm	3.0/4.0	13B1X00053 C00027
22349.04	トレフィンドリル φ 4/5mm	4.0/5.0	
22349.06	トレフィンドリル φ 6/7mm	6.0/7.0	
22349.08	トレフィンドリル φ 8/9mm	8.0/9.0	

カタログ番号	カタログ名	全長 (cm)	届出番号
3230.14	ボーラーダブルアクシオン 15cm	15	13B1X00053 C00001

カタログ番号	カタログ名	先端長 (mm)	先端最大幅 (mm)	届出番号
4053.55	コッハー リトラクター 55×11mm	55	11	13B1X00053 C00004

カタログ番号	カタログ名	先端最大幅 (mm)	届出番号
14744.18	バラッセル/シュメルツアイゼン持針器 1.2mm 18 cm TC	1.2	13B1X00053 C00005

カタログ番号	カタログ名	全長 (cm)	届出番号
3545.16	ケリー 16cm 鋸歯	16.0	13B1X00053 C00006

カタログ番号	カタログ名	刃部幅 (mm)	届出番号
13321.14	シュメルツアイゼン チゼル 曲 4mm 目盛付 hy-grip	4.0	13B1X00053 C00007
13321.18	シュメルツアイゼン チゼル 曲 8mm 目盛付 hy-grip	8.0	

カタログ番号	カタログ名	全長 (cm)	届出番号
14091.17	メンブレンホールディングフォーセプス hy-grip	17.0	13B1X00053 C00008

カタログ番号	カタログ名	先端幅 (mm)	届出番号
14136.17	クーリー シュメルツアイゼンティッシュフォーセプス φ 0.8mm hy-grip	0.8	13B1X00053 C00008
14096.17	クーリー マイクロフォーセプス 0.8mm hy-grip	0.8	

カタログ番号	カタログ名	全長 (cm)	届出番号
3318.17	ビッカーズ サージカルマレット φ 25mm 17cm 210g hy-grip	17.0	13B1X00053 C00012

カタログ番号	カタログ名	先端幅 (mm)	届出番号
14427.00	エモス hy-grip	8.0/8.0	13B1X00053
14418.00	バルチ ブーザー hy-grip	5.0/3.0	C00013
14422.00	バルチ モルト hy-grip	11/8.0	

カタログ番号	カタログ名	グリップ径 (mm)	届出番号
14514.03	スカルペルブレードホルダー φ 8mm hy-grip	8.0	13B1X00053 C00016

カタログ番号	カタログ名	先端最大幅 (mm)	届出番号
14621.30	ルーカス キュレット 3.0/3.0mm hy-grip	3.0/3.0	13B1X00053 C00023

カタログ番号	カタログ名	先端幅 (mm)	届出番号
12961.00	ペリオトーム#3 2/2mm φ 8mm hy-grip	2/2	13B1X00053 C00030

カタログ番号	カタログ名	先端径 (mm)	届出番号
14618.00	ピーラー メンブレンリフト/グラニュレートブラガー hy-grip	6.0/5.0	13B1X00053 C00031

カタログ番号	カタログ名	全長 (cm)	届出番号
13553.16	ゴメル シュメルツアイゼン マイクロシサー 16cm	16.0	13B1X00053 C00057

カタログ番号	カタログ名	先端部目盛 (mm)	届出番号
12930.00	ペリオプローブ PNC/EX3A イクルホウト hy-grip	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/-	13B1X00053 C00061

カタログ番号	カタログ名	先端幅 (mm)	届出番号
14615.00	スタイグマン ボーンスクレイパー/アプリケーションター φ 10mm	7.0/7.5	13B1X00053 C00063

カタログ番号	カタログ名
※76423.00	フライブルグキッットレイ
※6668.05	トレフィンドリル専用スタンド (5 本用)
※6671.25	ボウル 25cc

※雑品

3.組成

ステンレス鋼
タングステンカーバイド
アルミニウム合金
プラスチック

【使用目的又は効果】

口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具である。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高压蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 本品を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は、開放し汚れを残留させないこと。

2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ:<http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :ドイツ

輸入先製造業者:ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)