


機械器具 64 歯科用探針

一般医療機器 歯周ポケットプローブ (31848000)

STM 歯周ポケットプローブ

**【形状・構造及び原理等】

**1.形状

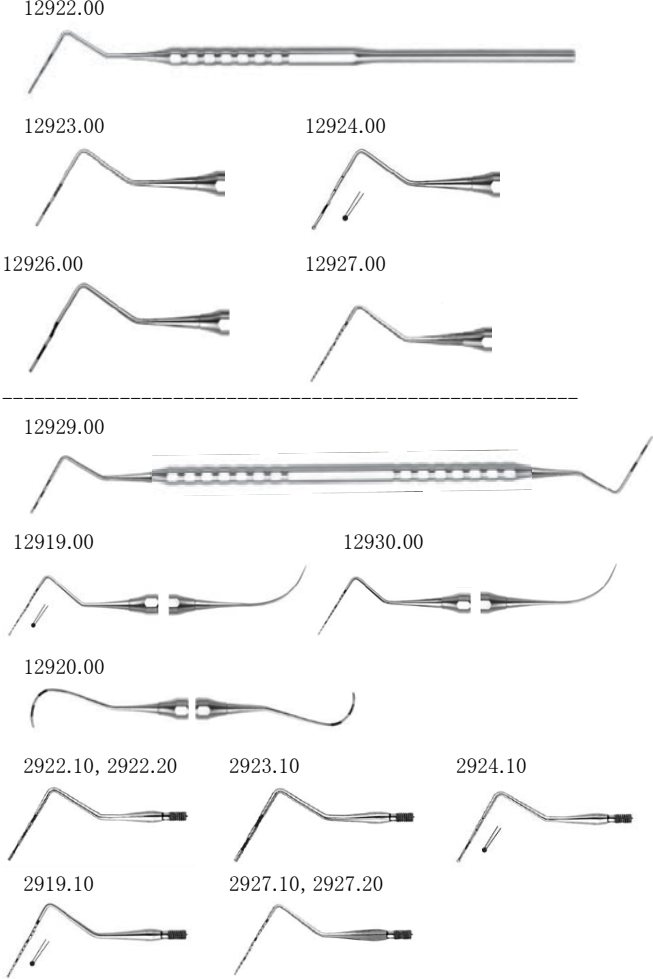

**2.寸法

カタログ 番号	カタログ名	先端部目盛(mm)
12922.00	ペリオプローブ PCPN22 hy-grip	2-4-6-8-10-12
12923.00	ペリオプローブ PCP12 hy-grip	3-6-9-12
12924.00	ペリオプローブ PCP11.5WHO hy-grip	3.5-5.5-8.5-11.5
12926.00	ペリオプローブ PCP11 hy-grip	3-6-8-11
12927.00	ペリオプローブ PNC ノースカロライナ hy-grip	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
12929.00	ペリオプローブ スチューダ ユーラー hy-grip	2-4-6-8-10-12 / 3-6-9-12
12919.00	ペリオプローブ PCP/EX3A シルマンズ hy-grip	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/-
12930.00	ペリオプローブ PNC/EX3A イクルホウト hy-grip	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/-
12920.00	ペリオプローブ CQ2N ネバー ス hy-grip	3-6-9-12 / 3-6-9-12
2922.10	ペリオプローブチップ PCPNG22	2-4-6-8-10-12
2922.20	ペリオプローブチップ PCPNGT22 チタン	2-4-6-8-10-12
2923.10	ペリオプローブチップ PCPG12	3-6-9-12

2924.10	ペリオプローブチップ PCPG11.5WHO	3.5-5.5-8.5-11.5
2919.10	ペリオプローブチップ PCP シルマンズ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
2927.10	ペリオプローブチップ PCNCG ノースカロライナ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
2927.20	ペリオプローブチップ PCNCGT ノースカロライナ チタン	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

*3.組成
ステンレス鋼 / チタン

【使用目的又は効果】

本品は、先端部に目盛がある歯科用器具であり、歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定する事を目的として使用する。

*【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 先端の目盛部を歯周ポケットに挿入して、深さを測定する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ:http://www.itx.co.jp
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :ドイツ
輸入先製造業者:ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)