

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子(70683000)
ナイフハンドル(12235000)/ ピンセット(35079001)/ 持針器(12726010)/ 歯科用歯肉はさみ(31822000)/ はさみ(35325001)/
骨刀(12844000)/ 歯科用インプラント手術器具(70965001)

マイクロサージェリーキット

形状・構造及び原理等

1.形状

19908.03



14510.00



14413.00



14419.03



14062.47



14140.17



14760.48



13555.46



3562.13




14620.00



14616.00



6553.00

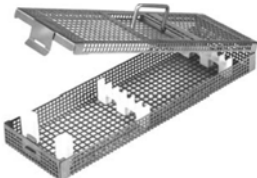

2.構成品

マイクロサージェリーキット (19908.03)

カタログ 番号	カタログ名	先端幅 (mm)	届出番号
14510.00	マイクロスカルペルブレードホルダー φ 8mm hy-grip	—	13B1X00053 C00016
14413.00	イクルホウト マイクロ hy-grip	3.0/3.0	13B1X00053
14419.03	デワイズ 3/3mm hy-grip	3.0/3.0	C00013
14062.47	クーリー マイクロフォーセプス 0.6mm hy-light	0.6	13B1X00053
14140.17	サラマ コーン フォーセプス hy- grip	—	C00008
14760.48	ブツケリ MC ニードルホルダー 0.6mm 18cm TC HL	0.6	13B1X00053 C00005

カタログ 番号	カタログ名	全長 (cm)	届出番号
13555.46	ブツケリ ウルトラファイン シサー 曲 16cm HL	16.0	13B1X00053 C00057
3562.13	ゴールドマンフォックス 曲 鋸歯	13.0	13B1X00053 C00006

カタログ 番号	カタログ名	刃部幅 (mm)	届出番号
14620.00	ボーンスクレイパー φ8mm	7.0/5.0	13B1X00053 C00063

カタログ 番号	カタログ名	先端径/ 幅 (mm)	届出番号
14616.00	ビーラー ボーングラフトパッカー/ スプーン hy-grip	3.0/8.0	13B1X00053 C00031
※6553.00	p.i.c.トレイ 271×86×34mm		

※雑品

3.組成

ステンレス鋼

タングステンカーバイド

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離等に用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。

推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間

2. キット内の器具を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレープ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は、開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用するこ
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。

5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インブラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸 入 先 国 : ドイツ
輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)