

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子(70683000)

プラスチック エステティック サージェリーキット

**【形状・構造及び原理等】

**1.形状
*19908.04



14446.21



14446.22



14446.23



14446.24



14439.00



12839.00



12850.00



2991.07



**2.構成品

プラスチック エステティック サージェリーキット (19908.04)

カタログ 番号	カタログ名	一般的名称 (JMDNコード)	先端幅 (mm)
14446.21	スクリーン トンネル イン スツルメント ミニ #1 hy-grip	歯科用起子及び剥 離子(70683000)	1.5/2.0
14446.22	スクリーン トンネル イン スツルメント ミニ #2 hy-grip	歯科用起子及び剥 離子(70683000)	1.5/2.0
14446.23	スクリーンアロカ トンネリ グ インスツルメント ミニ #1 hy-grip	歯科用起子及び剥 離子(70683000)	1.5/1.5

14446.24	スクリーンアロカ トンネリ グ インスツルメント ミニ #2 hy-grip	歯科用起子及び剥 離子(70683000)	1.5/1.5
14439.00	アレン トンネルエレベータ ー 2/2mm hy-grip	歯科用起子及び剥 離子(70683000)	2.0/2.0
12839.00	ボーンチゼル 2.5/3.0mm hy-grip	のみ (10824000)	2.5/3.0
12850.00	ペリオドンタルチゼル 3/2mm hy-grip	のみ (10824000)	3.0/2.0
※ 2991.07	p.i.c.トレイ 180×86× 30mm クランプクリップ式	—	—

※雑品

3.組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離等に用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20分間
134℃ 5分間
2. キット内の器具を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :ドイツ
輸入先製造業者:ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)