

機械器具 42 医療用剥離子  
 一般医療機器 歯科用起子及び剥離子(70683000)  
 のみ(10824000)

## プラスチック エステティック サージェリーキット

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### \*1.形状

19908.04



14439.00	アレン トンネルエレベーター 2/2mm hy-grip	2.0/2.0	13B1X00053 C00013
12839.00	ボーンチゼル 2.5/3.0mm hy-grip	2.5/3.0	13B1X00053
12850.00	ペリオドンタルチゼル 3/2mm hy-grip	3.0/2.0	C00007
※ 2991.07	p.i.c.トレイ 180×86×30mm クラ ンプクリップ式		

※雑品

#### 3.組成

ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

本品は、口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離等に用いる歯科用器具である。

### 【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件: 121℃ 20分間  
134℃ 5分間
2. キット内の器具を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

### 【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起す恐れがあるので使用しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス  
 ホームページ: <http://www.itx.co.jp>  
 TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :ドイツ

輸入先製造業者: ストーマ社

(Storz am Mark GmbH)

#### \*\*2.構成品

プラスチック エステティック サージェリーキット (19908.04)

カタログ 番号	カタログ名	先端幅 (mm)	届出番号
14446.21	スクリーン トンネル インstrument トミニ #1 hy-grip	1.5/2.0	13B1X00053 C00013
14446.22	スクリーン トンネル インstrument トミニ #2 hy-grip	1.5/2.0	
14446.23	スクリーンアロカ トンネリング イン strumentトミニ #1 hy-grip	1.5/1.5	
14446.24	スクリーンアロカ トンネリング イン strumentトミニ #2 hy-grip	1.5/1.5	