

機械器具 42 医療用剥離子

一般医療機器 歯科用起子及び剥離子(70683000)

手術用骨鉗子(32853000)/ 持針器(12726010)/ はさみ(35325001)/ ピンセット(35079001)/ 歯鏡(31776000)/ ナイフハンドル(12235000)/
歯科用歯肉はさみ(31822000)/ 歯周ポケットプローブ(31848000)

チーム白鳥インプラント外科キット

**【形状・構造及び原理等】

*1. 形状

19911.00



14425.00



14427.00



14520.03




13551.16



12930.00



76445.00

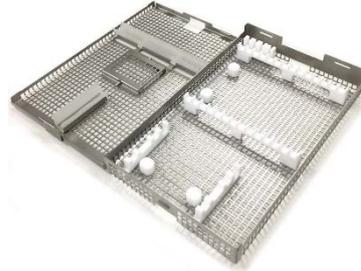

3230.18



14746.18



3602.13



** 2. 構成品

チーム白鳥インプラント外科キット (19911.00)


カタログ番号	カタログ名	全長(cm)	届出番号
3230.18	バイヤー ダブルアクション ラウンド 18cm	18	13B1X00053C00001
14746.18	バラッケル ニードルホルダー曲 1.2mm 18cm TC	18	13B1X00053C00005
3602.13	ゴールドマンフォックス 曲 SC	13	13B1X00053C00006

カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)	届出番号
14094.17	マイクロフォーセプス 有鉤 0.8mm hy-grip	0.8	13B1X00053C00008
14093.17	マイクロフォーセプス 0.8mm TC hy-grip	0.8	
15095.17	コレージ マイクロフォーセプス 曲 hy-grip	1.8	

カタログ番号	カタログ名	ハンドル径(mm)	届出番号
15108.00	ミラーハンドル φ8mm hy-grip	8.0	13B1X00053C00011

カタログ番号	カタログ名	ミラーヘッド径(mm)	届出番号
34964.00	メガデュオミラー ロジウム平面 φ22mm	22	13B1X00053C00011

カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)	届出番号
14413.00	イクルホウト マイクロ hy-grip	3.0/3.0	13B1X00053C00013
14425.00	プリチャード PR3 hy-grip	5.0/10.5	
14427.00	エモス hy-grip	8.0/8.0	

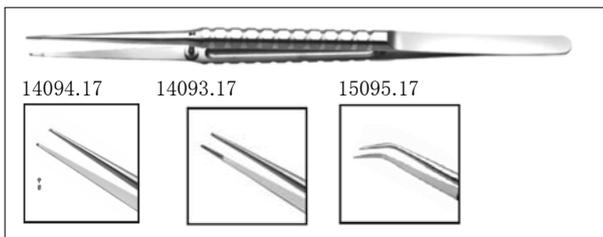

15108.00



34964.00



14413.00



カタログ番号	カタログ名	ハンドル径 (mm)	届出番号
14520.03	スカルペルブレードホルダー φ 10mm hy-grip	10	13B1X00053 C00016
カタログ番号	カタログ名	全長(cm)	届出番号
13551.16	ゴメル マイクロシサー曲 16cm hy-grip	16.0	13B1X00053 C00057
カタログ番号	カタログ名	先端部目盛(mm)	届出番号
12930.00	ペリオプローブ PNC/EX3A イクルホウト hy-grip	1-2-3-4-5-6-7- 8-9-10-11-12- 13-14-15/—	13B1X00053 C00061
※76445.00	チーム白鳥インプラント外 科キットトレイ		

※雑品

3.組成

ステンレス鋼
タングステンカーバイド
ロジウム加工ガラス

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離等に用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20分間
134℃ 5分間
2. キット内の器具を用いて骨膜、粘膜等の組織の剥離等を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 使用目的以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は、開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :ドイツ

輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)