

機械器具 65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用充填器 (70680000)

Salvin 歯科用充填器

\*【形状・構造及び原理等】

\*1.形状

GRAFTSYRINGE-CURVED



GRAFTSYRINGE-STR



GRAFT-SYR-S-CURV



GRAFT-SYR-S-STR



HA SYRINGE



\*2.寸法

| カタログ番号              | カタログ名                   | 先端内径<br>(mm) |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| GRAFTSYRINGE-CURVED | ビッググラフトシリンジ φ 5.0mm・曲   | 5.0          |
| GRAFTSYRINGE-STR    | ビッググラフトシリンジ φ 5.0mm     | 5.0          |
| GRAFT-SYR-S-CURV    | ビッググラフトシリンジ S φ 3.6mm・曲 | 3.6          |
| GRAFT-SYR-S-STR     | ビッググラフトシリンジ S φ 3.6mm   | 3.6          |
| HA SYRINGE          | スモールグラフトシリンジ            | 2.5          |

3. 組成

ステンレス鋼  
プラスチック

【使用目的又は効果】

本品は骨移植を行う際に、移植部位への填入に使用する。

\*【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高压蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間  
134℃ 5 分間
2. 移植部位を本品に充填する。
3. 移植部位に採取骨片を先端から押し出し填入する。
4. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

本品は品質保持のため、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室

温で清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は、開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インブラテックス  
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>  
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505  
輸 入 先 国 : アメリカ合衆国  
輸入先製造業者: サルビンデンタルスペシャルティーズ社  
(Salvin Dental Specialties, LLC)