

機械器具 65 歯科用充填器  
 一般医療機器 歯科用充填器(70680000)

## Salvin 歯科用充填器

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### \*\*1.形状

GRAFTSYRINGE-CURVED



GRAFTSYRINGE-STR



GRAFT-SYR-S-CURV



GRAFT-SYR-S-STR



GRAFT-SYRINGE-3.5



GRAFT-SYRINGE-4.5



HA SYRINGE



#### \*\*2.寸法

カタログ番号	カタログ名	先端内径 (mm)
GRAFTSYRINGE-CURVED	ビッググラフトシリンジ φ5.0mm・曲	5.0
GRAFTSYRINGE-STR	ビッググラフトシリンジ φ5.0mm	5.0
GRAFT-SYR-S-CURV	ビッググラフトシリンジ S φ3.6mm・曲	3.6
GRAFT-SYR-S-STR	ビッググラフトシリンジ S φ3.6mm	3.6
GRAFT-SYRINGE-3.5	グラフトシリンジカーブ 3.5 mm	3.5
GRAFT-SYRINGE-4.5	グラフトシリンジカーブ 4.5 mm	4.5
HA SYRINGE	スモールグラフトシリンジ	2.5

#### 3. 組成

ステンレス鋼  
 プラスチック

#### 【使用目的又は効果】

本品は骨移植を行う際に、移植部位への填入に使用する。

#### 【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。  
 推奨滅菌条件:121℃ 20 分間

134℃ 5 分間

2. 移植部位を本品に充填する。
3. 移植部位に採取骨片を先端から押し出し填入する。
4. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

#### 【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、附着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起す恐れがあるので使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

本品は品質保持のため、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

#### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は、開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

#### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス  
 ホームページ:http://www.itx.co.jp  
 TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :アメリカ合衆国  
 輸入先製造業者:サルビンデンタルスペシャルティーズ社  
 (Salvin Dental Specialties, LLC)