

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 (10861001)

Salvin 鉗子

＊【形状・構造及び原理等】

＊1.形状
BONE-BLOCK-CLAMP



＊2.寸法

カタログ番号	カタログ名	全長 (cm)
BONE-BLOCK-CLAMP	ボーンブロッククランプ 前歯部用 19.7cm	19.7

3. 組成
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、骨などの硬組織を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高压蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間。
2. 本品先端部で骨等の硬組織を把持固定する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレープ等にて滅菌して保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505
輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者: サルビンデンタルスペシャルティーズ社
(Salvin Dental Specialties, LLC.)