

機械器具 43 医療用つち
一般医療機器 つち(11947010)

Salvin サージカルマレット

【形状・構造及び原理等】

1.形状

TACK-MALLET



2.寸法

カタログ番号	カタログ名	全長(cm)
TACK-MALLET	ボーンタックマレット	22.0

3.組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、ハンドル、軸及びヘッドからなる器具であり、槌打が必要な場合にヘッド部で槌打する。

【使用方法等】

- 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
- 本品を用いて槌打を行う。
- 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
- 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用するこ
- 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
- 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
- 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
- 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インブラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:サルビンデンタルスペシャルティーズ社
(Salvin Dental Specialties, LLC)